

**SenSura®**  
**SenSura® Xpro**  
**SenSura® Convex**  
**SenSura® Convex Xpro**



如何使用

Ostomy bag 1-piece open  
一件式開口造口袋

Ostomy Care  
造口護理



使用說明  
23326327 Version 1  
Coloplast 標誌是 Coloplast A/S 的註冊商標。保留所有權利。© 2021-03-05  
Velcro® 為 Velcro Industries B.V 所擁有

預期用途

本造口袋用於被動收集造口排出物。黏膠底座連接於造口袋，用於黏貼在造口周圍完好的皮膚上。

適應症

本器材適用於具有造口的患者。

警告

不建議重複使用一次性使用產品，因為可能會發生交叉污染。

重新處理、洗滌、消毒和/或（重新）滅菌可能損害產品特性，造成對使用者的身體傷害或令其受到感染的額外風險。

注意

為了正確使用，使用墊高片產品前，請向您的造口照護護士或醫生諮詢建議。

資訊

一次性使用造口袋。

在取出使用之前，產品適合存放在包裝盒內，因為包裝盒可保護產品，而且包裝盒上的標籤載有重要資訊，如批號、使用期限和唯一的條碼。

在進行 MR 掃描前無需移除該產品，因為它是 MR 安全的器械。


若因未依康樂保公司現行建議使用本產品，而造成任何傷害或有可能出現的其他損失，康樂保公司概不承擔任何責任。

特殊存放條件


水平存放。

避免日曬。


準備

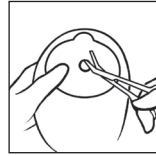


使用小型的弧形剪刀和底座上的切割導引器，在底座中切出一個完全符合造口大小和形狀的洞。  
您可以使用產品附有的造口測量尺來測量造口的大小和形狀。  
為了減少造口排泄物浸潤皮膚，開孔和造口完全密合很重要。

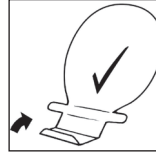

將造口袋放在平坦表面上，魔術貼朝下。  
將出口處底部向上摺疊三次，可看到 Velcro® 魔術貼黏條，以便封閉出口處。


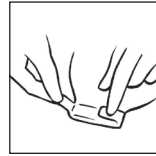


將旁邊的魔術貼向內摺疊，以固定 Velcro® 魔術貼。

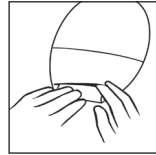


使用出口處附近的 Velcro® 魔術貼或造口袋中央的 Velcro® 魔術貼黏條，便可將出口處隱藏起來。

（此不適用於透明造口袋，透明造口袋中間沒有 Velcro® 魔術貼）

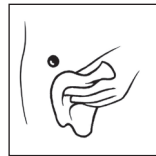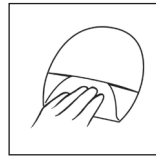


使用底座前，請確保皮膚乾淨且乾爽。

使用方法

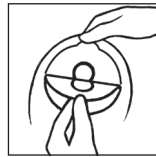

撕下黏膠上的保護膜。

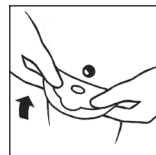


將底座對齊造口周圍並在底座上施加壓力。  
黏膠必須沿造口周圍貼緊。為防止滲漏，務必要確保沿造口周圍密封嚴密。在腹部上用力按壓底座/造口袋時，要從造口周圍開始，然後將黏膠按壓到皮膚上。手指沿造口周圍按壓，確保黏膠密封。從造口開始，向外邊緣移動撫平黏膠以確保黏膠與皮膚充分接觸。



在造口袋上按壓，以確保底座牢固的貼合於皮膚上。

## 如何排空造口袋

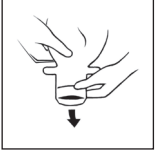

有需要時，可打開出口處，將造口袋內的東西全部排出到馬桶。



清潔出口處，例如，用衛生紙。待造口袋排空後，將出口處摺疊並重新固定。

## 移除



將底盤上突出處(凸耳)從皮膚朝外拉出，輕輕取出造口袋。  
一隻手按住皮膚，同時向下緩慢小心地移除造口袋，即可將它從皮膚移除。

## 棄置

本產品僅供一次性使用，並應遵循當地的規範（例如，與正常居家垃圾一起）處置。

請勿將本產品丟入馬桶沖走。

## 過濾碳片



如需阻擋氣體逸散，可將過濾碳片放在過濾器上。

## 報告事故

如果在使用此產品期間或因使用此產品而發生嚴重事故，請向製造商及您所在國家/地區的主管機關報告。

## 符號說明



醫療器械



表示該產品符合歐洲的醫療器械法規



目錄編號



使用期限（年 年 年 年-月 月-日 日）



批號



製造日期（年 年 年 年-月 月-日 日）



製造商



請參閱使用說明



請勿重複使用



表示條碼包含唯一器材識別



(Global Trade Item Number) 全球貿易貨品編碼



避免日曬



此面朝上



可回收包裝



MR 安全