

SenSura®
SenSura® Xpro
SenSura® Convex
SenSura® Convex Xpro

1-delna urostomska vrečka

Nega stome



Navodila za uporabo

23326399 Version 1

Logotip Coloplast je registrirana blagovna znamka družbe Coloplast A/S.
Vse pravice pridržane. © 2021-02-19

Predvideni namen

Vrečka za stomo je namenjena pasivnemu zbiranju izločkov iz stome. Lepilna kožna podloga je pritrjena na vrečko za stomo in je namenjena pritrditvi na zdravo kožo okoli stome.

Indikacije

Pripomoček je indiciran za ljudi s stomo.

Opozorila

Ponovno uporabo izdelka za enkratno uporabo odsvetujemo zaradi možnosti navzkrižne kontaminacije.

Predelava, čiščenje, dezinfekcija in sterilizacija lahko poslabšajo lastnosti izdelka, kar predstavlja dodatno nevarnost za telesne poškodbe ali okužbo bolnika.

Svarila

Za pravilno uporabo konveksnega izdelka se posvetujte z zdravstvenim delavcem, preden začnete konveksni izdelek uporabljati.

Informacije

Urostomska vrečka za enkratno uporabo.

Izdelki morajo biti do uporabe shranjeni v škatlji, saj jim ta zagotavlja zaščito, oznaka na škatlji pa vsebuje pomembne informacije, kot so koda serije, rok uporabnosti in edinstvena črna koda.

Pripomočka pred magnetnoresonančnim slikanjem ni treba odstraniti, saj je varen za uporabo v tem okolju.

Družba Coloplast ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe ali škodo, ki lahko nastane, če izdelek ni uporabljen skladno z veljavnimi priporočili podjetja Coloplast.

Posebni pogoji shranjevanja


Izdelek hranite vodoravno.

Izdelka ne izpostavljajte soncu.



Postopek uporabe

Priprava

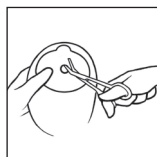


Z uporabo majhnih ukrivljenih škarij in rezilne šablone na kožni podlogi izrežite odprtino v kožni podlogi za natančno prileganje glede na velikost in obliko stome. Uporabite lahko priloženi merilni pripomoček za stomo, da izmerite velikost in obliko stome. Natančno prileganje med odprtino in stomo je pomembno za zmanjšanje tveganja puščanja in težav s kožo.




Temeljito očistite stomo in kožo okoli nje. Koža mora biti pred namestitvijo kožne podloge popolnoma suha.

Namestitev

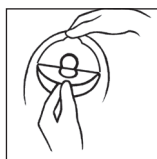


Odlepite zaščitni sloj s kožne podloge.

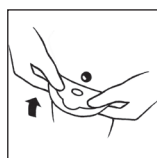

Poravnajte kožno podlogo okoli stome in jo čvrsto pritisnite na kožo. Kožna podloga se mora dobro prilegati okoli stome. Za preprečevanje zatekanja je pomembno zagotoviti dobro tesnjenje okoli stome. Ko izvajate pritisk na podlogo/vrečko na trebuhu, začnite v predelu okoli stome in pritisnite kožno podlogo na kožo. S prstom se pomikajte po celotni poti okoli stome, da zagotovite, da kožna podloga tesni. Zgladite kožno podlogo, tako da začnete pri stomi in se pomikate navzven proti robovom, da zagotovite, da se kožna podloga popolnoma prilega koži.



Pritisnite na vrečko, da zagotovite hitro lepljenje in popolno prileganje kožne podloge s kožo okoli stome. Ne pozabite zapreti izpusta pred uporabo.

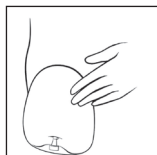


Izpust je lahko skrit v žepu spredaj za večjo udobnost in diskretnost. (Velja samo za vrečke, pri katerih sprednji del ni tkan.)

Kako izprazniti vrečko



Držite čep/konec izpusta obrnjen navzgor in stisnite zunanji konec izpusta, izvalcite čep in popustite prijem izpusta, nato pa drenirajte vrečko. Po dokončani drenaži se prepričajte, da je izpust čvrsto zaprt, čep pa popolnoma vstavljen.

Odstranjevanje

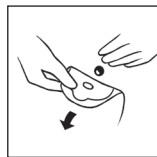


Previdno odstranite vrečko tako, da povlečete ušesce za odstranjevanje kožne podloge s kože in kožno podlogo počasi zvijete navzdol. S prsti roko lahko pritisnete na kožo, da olajšate odstranjevanje.

Odlaganje

Izdelek je namenjen samo za enkratno uporabo in ga morate odvreči v skladu z lokalnimi smernicami, tj. z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Izdelka ne splaknite v straniščno školjko.

Nočna vrečka za drenažo

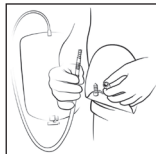

Za večjo varnost priporočamo, da uporabite obposteljno drenažno vrečko Coloplast, posebej zasnovano za neposredno povezavo v urostomalno vrečko. Vendar lahko urostomalne vrečke povežete z vsemi vrstami zbiralnikov za seč z uporabo priloženega konektorja. Ozki konec konektorja se potisne v izpust urostomalne vrečke, drugi konec pa se poveže z zbiralnikom za seč.

Poročanje o zapletih

Če med uporabo tega pripomočka ali zaradi njegove uporabe pride do resne težave, o njej poročajte izdelovalcu in državnemu organu.

Razlaga simbolov



Medicinski pripomoček



Pomeni, da je izdelek skladen z evropsko zakonodajo o medicinskih pripomočkih



Kataloška številka



Porabiti do (LLLL-MM-DD)



Številka serije



Datum izdelave (LLLL-MM-DD)



Proizvajalec



Glejte navodila za uporabo



Ni za ponovno uporabo



Nakazuje črtno kodo, ki vsebuje enolični identifikator naprave



(Global Trade Item Number) Globalna trgovinska številka izdelka



Izdelka ne izpostavljajte soncu



Ta stran navzgor



Embalaza, ki jo je mogoče reciklirati



Varno pri MR