

Avanpussi 1-osainen suljettu

Avanteen hoito

**Käyttöohje**

23326467 Version 1

Coloplast-logo on Coloplast A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Kaikki oikeudet pidätetään. © 2021-02-12

Käyttötarkoitus

Avanpussi on tarkoitettu avanteesta tulevan eritteen keräämiseen. Avanpussiin on liitetty pohjalevy, joka kiinnitetään ehjään, avanteen ympärillä olevaan ihoon.

Indikaatio

Laite on tarkoitettu ihmisille, joilla on avanne.

Varoitukset

Tämän kertakäyttötuotteen uudelleenkäyttö voi aiheuttaa käyttäjälle haittaa.

Uudelleenkäyttö, puhdistus, desinfiointi ja/tai (uudelleen)sterilointi voivat heikentää tuotteen ominaisuuksia, mikä taas muodostaa ylimääräisen fyysisen haitan tai infektion vaaran potilaalle.

Tietoa

Kertakäyttöinen avanpussi.

Tuotteet on tarkoitettu säilytettäväksi laatikossa, kunnes ne otetaan käyttöön, sillä laatikko suojaa tuotteita ja laatikon tarra sisältää tärkeitä tietoja, mm. eränumeron (LOT), viimeisen käyttöpäivän ja yksilöllisen viivakoodin.

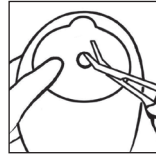
Laitetta ei tarvitse poistaa ennen magneettikuvausta, sillä se ei aiheuta vaaraa magneettikuvauksessa.

Coloplast ei ota vastuuta loukkaantumisista tai vahingoista, joita voi sattua, jos tuotetta käytetään Coloplastin voimassa olevien suositusten vastaisesti.

Eriyiset säilytysolosuhteet

Säilytä tuotetta vaakatasossa.

Suojattava suoralta auringonvalolta.

Valmistelu

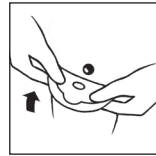
Leikkaa pohjalevyyn täsmälleen avanteen muotoinen ja kokoinen aukko pienillä, kaarevilla saksilla pohjalevyn leikkuuohjainta noudattaen. Voit käyttää laatikossa olevaa avannemittaa avanteen koon ja muodon mittaamiseen. Ohivuotojen ja iho-ongelmien minimoimiseksi on tärkeää, että aukko sopii tarkalleen avanteen ympärille.



Puhdista avanne ja sitä ympäröivä ihoalue huolellisesti. Ihon on oltava aivan puhdas ja kuiva ennen pohjalevyn asettamista.

Käyttö

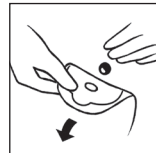
Irrota suojakalvo pohjalevystä.



Kohdista tarra avanteen ympärille ja paina se lujasti ihoon. Pohjalevyn täytyy sopia mukavasti avanteen ympärille. Ohivuotojen ehkäisemiseksi on tärkeää varmistaa, että pohjalevy istuu tiiviisti avanteen ympärillä. Silitä sormin tai painele kevyesti pohjalevy ihoon kiinni aloittaen avanteen juuresta. Kuljeta sormia avanteen ympäri ja varmista siten, että pohjalevy on tarttunut hyvin ihoon joka puolelta. Silitä pohjalevyä avanteen juuresta ulkoreunoja kohti ja varmista, että pohjalevy on hyvin kiinni ihossa.



Painele pussia, jotta pohjalevy kiinnittyy ja muotoutuu täydellisesti ihoon avanteen ympärillä.

Poistaminen

Irrota pussi varovasti vetämällä pohjalevyn irrotuskorvakkeesta avanteesta pois päin ja vedä pohjalevyä hitaasti alaspäin. Paina ihoa kevyesti vapaalla kädelläsi irrottamisen helpottamiseksi.

Hävittäminen

Tuote on tarkoitettu vain kertakäyttöön, ja se on hävitettävä paikallisten ohjeiden mukaisesti esim. normaalin talousjätteen mukana.

Älä huuhtelee tuotetta alas WC:stä.

Suodatintarra

Kiinnitä tarvittaessa yksi suodatintarroista suodattimen päälle estämään kaasun pääsyä ulos pussista.

Vaaratilanteista ilmoittaminen

Jos tämän laitteen käytön aikana tai sen käytön seurauksena tapahtuu vakava vaaratilanne, siitä on ilmoitettava valmistajalle ja kansallisille viranomaisille.

Symbolien merkitykset



Lääketieteellinen ja kirurginen laite



Osoittaa, että tuote noudattaa Euroopan lääketieteellisiä ja kirurgisia laitteita koskevaa lainsäädäntöä



Luettelonumero



Viimeinen käyttöpäivä (VVVV-KK-PP)



Eräkoodi



Valmistuspäivämäärä (VVVV-KK-PP)



Valmistaja



Lue käyttöohje



Ei saa käyttää uudelleen



Osoittaa, että viivakoodi sisältää laitteen yksilöidyn tunnisteen



(Global Trade Item Number) Kauppanimikkeen maailmanlaajuinen yksilöity numero



Suojattava suoralta auringonvalolta



Tämä puoli ylöspäin



Kierrätettävä pakkausmateriaali



Turvallinen MRI-laitteen kanssa