

SenSura®
SenSura® Xpro
SenSura® Convex
SenSura® Convex Xpro

2-delna odprta vrečka za stomo Click

Kožna podloga za stomo

Nega stome



Navodila za uporabo

23326860 Version 1

Logotip Coloplast je registrirana blagovna znamka družbe Coloplast A/S.

Vse pravice pridržane. © 2021-03-12

Velcro® je v lasti družbe Velcro Industries B.V.

Predvideni namen

Vrečka za stomo je namenjena pasivnemu zbiranju izločkov iz stome. Lepilna kožna podloga je pritrjena na vrečko za stomo in je namenjena pritrditvi na zdravo kožo okoli stome.

Indikacije

Pripomoček je indiciran za ljudi s stomo.

Opozorila

Ponovno uporabo izdelka za enkratno uporabo odsvetujemo zaradi možnosti navzkrižne kontaminacije.

Predelava, čiščenje, dezinfekcija in sterilizacija lahko poslabšajo lastnosti izdelka, kar predstavlja dodatno nevarnost za telesne poškodbe ali okužbo bolnika.

Svarila

Za pravilno uporabo konveksnega izdelka se posvetujte z zdravstvenim delavcem, preden začnete konveksni izdelek uporabljati.

Informacije

Vrečka za stomo za enkratno uporabo.

Izdelki morajo biti do uporabe shranjeni v škatli, saj jim ta zagotavlja zaščito, oznaka na škatli pa vsebuje pomembne informacije, kot so koda serije, rok uporabnosti in edinstvena črna koda.

Pripomočka pred magnetnoresonančnim slikanjem ni treba odstraniti, saj je varen za uporabo v tem okolju.

Družba Coloplast ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe ali škodo, ki lahko nastane, če izdelek ni uporabljen skladno z veljavnimi priporočili podjetja Coloplast.

Posebni pogoji shranjevanja


Izdelek hranite vodoravno.

Izdelka ne izpostavljajte soncu.




Postopek uporabe


Priprava

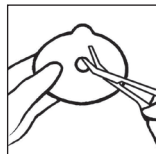


Z uporabo majhnih ukrivljenih škarij in rezilne šablone na kožni podlogi izrežite odprtino v kožni podlogi za natančno prileganje glede na velikost in obliko stome. Uporabite lahko priloženi merilni pripomoček za stomo, da izmerite velikost in obliko stome. Natančno prileganje med odprtino in stomo je pomembno za zmanjšanje tveganja puščanja in težav s kožo.

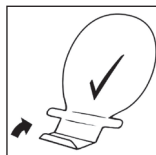

Postavite vrečko na ravno površino, tako da je spojna stran spodaj. Zaprite izpust s trikratnim prepogibanjem dna izpusta navzgor, tako da trak Velcro® postane viden.

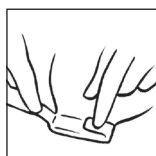

Zapognite oba ježka na zavihkih in ju pritrdite na trak Velcro®.

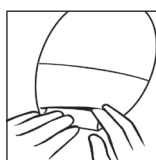

Izpust lahko skrijete z uporabo pike Velcro® neposredno nad izpustom ali z uporabo traku Velcro® na sredini vrečke.



(To ne velja za prozorne vrečke, kjer ni traku Velcro® na sredini vrečke.)




Temeljito očistite stomo in obdajajoče območje kože. Koža mora biti pred namestitvijo kožne podloge popolnoma suha.


Namestitev




Odlepите zaščitni sloj s kožne podloge.

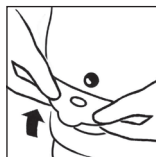


Poravnajte kožno podlogo okoli stome in pritisnite na kožno podlogo, da zagotovite hitro lepljenje in popolno prileganje kožne podloge s kožo okoli stome.

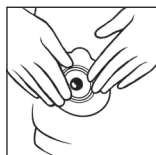

Kožna podloga se mora dobro prilegati okoli stome. Za preprečevanje zatekanja je pomembno zagotoviti dobro tesnjenje okoli stome. Ko izvajate pritisk na podlogo/vrečko na trebuhu, začnite v predelu okoli stome in pritisnite kožno podlogo na kožo. S prstom se pomikajte po celotni poti okoli stome, da zagotovite, da kožna podloga tesni. Zgladite kožno podlogo, tako da začnete pri stomi in se pomikate navzven proti robovom, da zagotovite, da se kožna podloga popolnoma prilega koži.

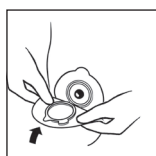

Prepričajte se, da je kožna podloga suha in čista (pri čiščenju kožne podloge uporabljajte samo vodo). Poskrbite, da je zaklepni obroček odprt. Dno spojnega dela vrečke pozicionirajte na dno spojnega dela kožne podloge.

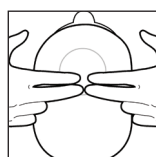

S sredincema pritisnite vrečko in kožno podlogo skupaj pri dnu.




S kazalcema nežno pritiskajte na vrh spojnega dela, dokler ne začutite, da je vrečka pravilno pozicionirana na kožno podlogo.



Zaprte zaklepni obroček tako, da zaklep pritisnete skupaj. Vrečka je varno pritrjena na kožno podlogo, ko zaslišite "klik".

Kako izprazniti vrečko

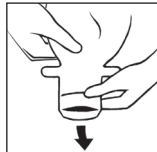

Odprite izpust in izpraznite vsebino vrečke v stranišče, ko je to potrebno.




Očistite izpust, na primer s toaletnim papirjem. Prepognite in ponovno zaprite izpust, potem ko ste izpraznili vrečko.


Odstranjevanje



Odstranite vrečko z odpiranjem zaklepne obročka tako, da s konico prsta pritisnete na majhen zavihek, ki je obrnjen proti trebuhu.

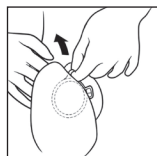

Držite ročico za odstranjevanje in odstranite vrečko tako, da jo previdno povlečete proč od kožne podloge.

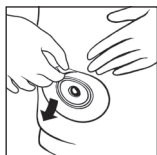

Previdno odstranite kožno podlogo tako, da povlečete zavihek za odstranjevanje kožne podloge s kože, kožno podlogo pa počasi zvijete navzdol. S prosto roko rahlo pritisnite na kožo, da olajšate odstranjevanje.

Odlaganje

Izdelek je namenjen samo za enkratno uporabo in ga morate odvreči v skladu z lokalnimi smernicami, tj. z ostalimi gospodinjskimi odpadki.


Izdelka ne splaknite v straniščno školjko.

Filtrirna nalepka



Po potrebi za preprečevanje uhajanja plina na filter nalepite eno od priloženih filtrirnih nalepk.

Pas

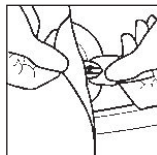

Povlecite trakova, da dolžino pasu prilagodite svojemu telesu. Blaga, ki prekriva zaponko, vam ni treba odstraniti.

Kaveljček pasu vstavite v ušesce za pas na vrečki za stomo ali kožni podlogi. Nato pas ovijte okoli telesa in kaveljček na drugem koncu pasu pritrdite na drugo ušesce za pas na vrečki za stomo ali kožni podlogi.

Po potrebi prilagodite dolžino pasu.
(Velja samo za izdelke z ušesi za pas.)

Poročanje o zapletih

Če med uporabo tega pripomočka ali zaradi njegove uporabe pride do resne težave, o njej poročajte izdelovalcu in državnemu organu.

Razlaga simbolov



Medicinski pripomoček



Pomeni, da je izdelek skladen z evropsko zakonodajo o medicinskih pripomočkih



Kataloška številka



Porabiti do (LLLL-MM-DD)



Številka serije



Datum izdelave (LLLL-MM-DD)



Proizvajalec



Glejte navodila za uporabo



Ni za ponovno uporabo



Nakazuje črtno kodo, ki vsebuje enolični identifikator naprave



(Global Trade Item Number) Globalna trgovinska številka izdelka



Izdelka ne izpostavljajte soncu



Ta stran navzgor



Embalaža, ki jo je mogoče reciklirati



Varno pri MR