


Preparación

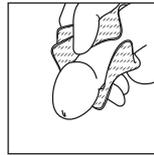

Recorte el vello púbico de ser necesario. Lave el pene con agua y jabón. Seque bien.


Aplicación

Al aplicar el producto, deje el prepucio en su lugar sobre el glande para prevenir que la piel se enrede o sea halada. Esto se aplica a hombres no circuncidados. Esta instrucción no aplica para hombres circuncidados.




Coloque el colector urinario enrollado sobre la cabeza del pene con el extremo angosto apuntando lejos del cuerpo. Deje un espacio de 1-2 cm entre la punta del pene y el tubo de salida estrecho para permitir un flujo libre de orina. Desenrolle lentamente el producto en su totalidad, o hasta el largo del pene.

Sostenga el colector urinario en su lugar con una mano y use la otra para tirar de la doble lengüeta.

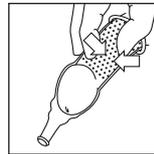

Apriete con suavidad la funda urinaria sin desenrollar alrededor del cuerpo del pene para asegurar la adherencia a la piel y para eliminar cualquier arruga. No se necesita adhesivo adicional.

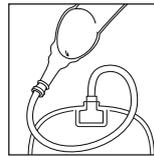

Una el producto a una bolsa de recolección de orina.

El sistema de recolección de orina ahora está funcionando.



Instrucciones de uso

23327017 Version 1

El logotipo de Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. Todos los derechos reservados. © 2021-03-03

Uso previsto

El propósito de las fundas urinarias es drenar la orina, normalmente hacia una bolsa de recolección de orina.

Indicaciones

Las fundas urinarias están indicadas para pacientes hombres que sufren de incontinencia urinaria.

Advertencia

No se recomienda reutilizar este producto desechable, ya que puede ocurrir contaminación cruzada.

Su reciclaje, limpieza, desinfección o (re)esterilización pueden afectar a las características del producto y exponer al usuario a un riesgo adicional de lesión o infección.

Información

Este es un producto para un solo uso.

La funda urinaria es autoadhesiva.

No es necesario retirar el dispositivo antes de realizar un escáner por RM, ya que es seguro para un entorno de RM.


El producto no está fabricado con látex de goma natural; no obstante, durante la fabricación o el empaquetado, puede ocurrir una contaminación poco frecuente con cantidades ínfimas de látex de goma natural.

No usar con preparados dermatológicos con base de alcohol a menos que esté bien seco. El alcohol residual puede causar degradación de material o adherencia excesiva a la piel.

No usar con cremas y polvos. El uso de estos productos con el colector urinario puede hacer que el adhesivo no funcione efectivamente.

Coloplast no se hace responsable de ninguna lesión o pérdida que puedan producirse si este producto no se utiliza siguiendo las actuales recomendaciones de Coloplast.

Extracción

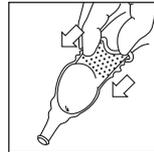

Desconecte el producto de la bolsa de recolección de orina.

Sujete la funda urinaria en la base y enrolle con cuidado hacia adelante.

Eliminación



Cambie el producto de acuerdo con las pautas y recomendaciones locales. Cada producto debe ser usado durante no más de 24 horas.

Mantenimiento de la piel: Si es posible, permita que la piel respire por periodos cortos entre cambios del producto.

El producto está diseñado para un solo uso y debe eliminarse de conformidad con las normas locales, por ejemplo, junto con los residuos domésticos comunes.

No tire el producto por el inodoro.

Notificación de incidentes

Si, durante el uso de este dispositivo o como resultado de su uso, se produce un incidente grave, notifíquelo al fabricante y a las autoridades nacionales.

Explicación de los símbolos



Producto sanitario



Indica que el producto cumple la legislación europea para productos sanitarios



Número de catálogo



Fecha de caducidad (AAAA-MM-DD)



Código de lote



Fecha de fabricación (AAAA-MM-DD)



Fabricante



Consulte las instrucciones de uso



No reutilizar



No está fabricado con látex de goma natural.



Indica un código de barras que contiene la Identificación Única del Dispositivo



(Global Trade Item Number) Número mundial de artículo comercial



Mantener alejado de la luz del sol



Envase reciclable



Seguro para RM