


6

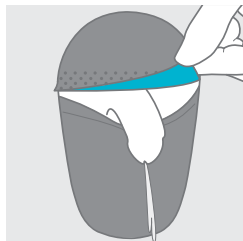

L'ouverture avant est repositionnable. Ouvrez-la pour uriner normalement sans retirer le produit. Refermez-la après avoir uriné.

7



Portez vos sous-vêtements et vêtements habituels. Comme sous-vêtements, nous recommandons un slip ou des caleçons longs moulants pour soutenir le produit.


Retrait

8

Il est recommandé de changer le produit si la partie absorbante a atteint sa pleine capacité ou si elle est mouillée au toucher. Retirer le produit en cas d'irritation cutanée.

Élimination

9

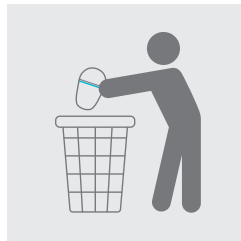

Le produit doit être éliminé conformément aux directives locales, par exemple avec les déchets ménagers.

Ne pas jeter le produit dans les toilettes.

Rangement et transport

10

Le produit se conserve et se transporte en toute discrétion. Il se conserve à plat et n'est pas encombrant. Il peut être plié pour être rangé dans une poche de pantalon pour le transport.

Gardez à l'abri de la lumière.



www.contend.net/guide-utilisation

CE Coloplast A/S
Høtveddam 1
3050 Humlebaek
Denmark

fr

Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

23327302 Version 2

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S.
Tous droits réservés. © 2021-08-10

 **Coloplast**

Contend™

Protection



Contend™

Destination

Protection en cas d'incontinence urinaire masculine.

Indications

Le produit est indiqué pour la prise en charge de l'incontinence urinaire légère à modérée chez les hommes adultes physiquement mobiles.

Le produit n'est pas indiqué pour les hommes dont le pénis est rétracté.

Mises en garde

La réutilisation de ce produit à usage unique n'est pas recommandée, car une contamination croisée pourrait se produire, entraînant potentiellement une infection locale.

Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et/ou la stérilisation peuvent compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de dommages corporels ou d'infection chez l'utilisateur.

Le produit n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel. Cependant une contamination rare peut se produire par des quantités infimes de latex de caoutchouc naturel durant la fabrication ou le conditionnement, entraînant potentiellement des irritations cutanées d'origine allergique chez les patients présentant des allergies connues ou suspectées au latex de caoutchouc naturel.

Signalement des incidents

Si un incident grave s'est produit au cours de l'utilisation de ce dispositif ou suite à son utilisation, le signaler au fabricant et aux autorités nationales compétentes.

Informations

Le produit est à usage unique et est destiné à être porté sur le pénis.

Le produit doit être changé au minimum toutes les 24 heures.

Si vous ressentez l'un des symptômes ci-dessous dans la région de l'aîne, retirez ou arrêtez d'utiliser le produit jusqu'à ce que les symptômes aient disparu :

- Infection/irritation cutanée
- Œdème
- Douleur
- Décoloration de la peau

Assurez-vous que votre peau est propre et sèche avant d'appliquer le produit.

Si vous utilisez une crème hydratante pour la peau, laissez-la sécher avant d'appliquer le produit.

Le produit a une capacité de 125 ml.

Retirez le produit avant de prendre un bain, une douche ou de nager.

Le produit se décline en différentes tailles qui se caractérisent par des diamètres de collerette extensible différentes.

Choisissez votre taille en fonction de vos besoins et de votre confort.

Vérifiez votre pénis une ou deux fois par jour pour éviter toute irritation ou macération cutanée.

Coloplast ne peut être tenu pour responsable des dommages pouvant résulter de l'emploi de ce produit dans des conditions non conformes aux instructions données dans la notice d'utilisation.

Explication des symboles


	Dispositif médical
	Indique que le produit est conforme à la législation européenne relative aux dispositifs médicaux
	Référence catalogue
	Date de péremption (AAAA-MM-JJ)
	Numéro de lot
	Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)
	Fabricant
	Consulter la notice d'utilisation
	Ne pas réutiliser
	Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
	Présente un support qui contient l'identifiant unique du dispositif
	(Global Trade Item Number) Code article international
	Conserver à l'abri de la lumière
	Haut
	Emballage recyclable

Utilisation


Préparation

- 1 Si besoin, coupez les poils pubiens.

Application

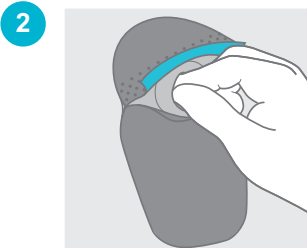


Insérez vos doigts dans l'ouverture avant du produit pour élargir la collerette extensible.

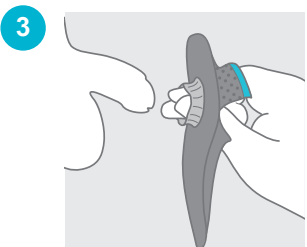

Avec la même main, saisissez votre pénis et tirez-le dans le produit à travers la collerette extensible et placez-la aussi près du corps que possible. Lorsque vous tirez sur le pénis, la collerette extensible se retourne à l'intérieur du produit. Cette opération est destinée à assurer l'étanchéité et le confort de port. Il n'est pas nécessaire de décalotter le gland. Ajustez le produit pour un port

confortable et assurez-vous que la collerette extensible s'adapte uniformément au pénis, sans plis ni sillons. Placez le pénis à l'intérieur du produit. Il est conseillé à l'utilisateur d'étirer la collerette extensible plusieurs fois si elle est trop serrée.

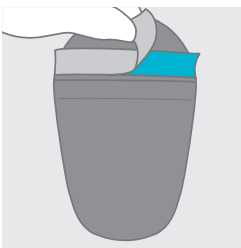

Retirez la languette de retrait de l'ouverture avant.



Fermez le produit. Pour assurer son étanchéité, vérifiez soigneusement que l'ouverture avant est fermée sur toute sa longueur. Faites particulièrement attention aux deux extrémités de l'ouverture avant en vous assurant qu'elles sont bien collées. Le produit est maintenant prêt à l'emploi.