

SenSura®

SenSura® Xpro

SenSura® Convex

SenSura® Convex Xpro

1-osainen tyhjennettävä avannepussi

Avanteen hoito



Käyttöohje

23327560 Version 1

Coloplast-logo on Coloplast A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki oikeudet pidätetään. © 2021-04-28

Velcro® on Velcro Industries B.V:n omaisuutta

Käyttötarkoitus

Avannepussi on tarkoitettu avanteesta tulevan eritteen keräämiseen.

Avannepussiin on liitetty tarttuva pohjalevy, joka on tarkoitettu kiinnittymään avanteen ympärillä olevaan ehjään ihoon.

Indikaatio

Laite on tarkoitettu ihmisille, joilla on avanne.

Varoitukset

Tämän kertakäyttöisen tuotteen uudelleenkäyttöä ei suositella, sillä se voi aiheuttaa ristikontaminaation ja mahdollisesti johtaa paikalliseen infektiin.

Uudelleenkäyttö, puhdistus, desinfiointi ja/tai (uudelleen)sterilointi voivat heikentää tuotteen ominaisuuksia, mikä taas muodostaa ylimääräisen fyysisen haitan tai infektion vaaran potilaalle.

Huomautus

Asianmukaisen käytön varmistamiseksi pyydä ohjeita terveydenhuollon ammattilaiselta, ennen kuin ryhdyt käyttämään kuperaa tuotetta.

Tietoa

Kertakäyttöinen avannepussi.

Tuotteet on tarkoitettu säilytettäväksi laatikossa, kunnes ne otetaan käyttöön, sillä laatikko suojaa tuotteita ja laatikon tarra sisältää tärkeitä tietoja, mm. eränumeron (LOT), viimeisen käyttöpäivän ja yksilöllisen viivakoodin.

Laitetta ei tarvitse poistaa ennen magneettikuvausta, sillä se ei aiheuta vaaraa magneettikuvauksessa.

Coloplast ei ota vastuuta loukkaantumisista tai vahingoista, joita voi sattua, jos tuotetta käytetään Coloplastin voimassa olevien suositusten vastaisesti.

Erityiset säilytysolosuhteet


Säilytä tuotetta vaakatasossa.

Suojattava suoralta auringonvalolta.




Käyttöohjeet


Valmistelu

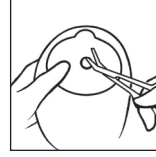


Leikkaa pohjalevyyn täsmälleen avanteen muotoinen ja kokoinen aukko pienillä, kaarevilla saksilla pohjalevyn leikkuuohjainta noudattaen. Voit käyttää laatikossa olevaa avannemittaa avanteen koon ja muodon mittaamiseen. Ohivuotojen ja iho-ongelmien minimoimiseksi on tärkeää, että aukko sopii tarkalleen avanteen ympärille.

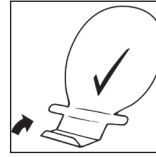

Aseta pussi tasaiselle alustalle liitospuoli alaspäin. Sulje tyhjennysosa taittamalla alhaalta ylöspäin kolme kertaa niin, että Velcro®-tarranauha tulee näkyviin.

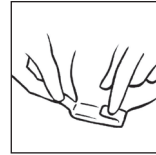


Kiinnitä Velcro®-tarra taivuttamalla kaksi tarranauhaa sisäänpäin.

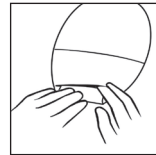

Tyhjennysosa voidaan nyt piilottaa heti sen yläpuolella tai pussin keskiosassa olevaan taskuun. Taskuissa on tarrapisteet, joihin tyhjennysosa kiinnitetään.

(Tämä ei kuitenkaan koske kirkkaita pusseja, joiden keskellä ei ole Velcro®-tarrapistettä).

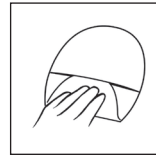


Puhdista avanne ja sitä ympäröivä ihoalue huolellisesti. Ihon on oltava aivan puhdas ja kuiva ennen pohjalevyn asettamista.

Käyttö



Irrota suojakalvo pohjalevystä.

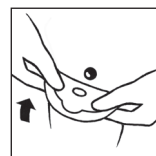


Kohdista tarra avanteen ympärille ja paina se lujasti ihoon. Pohjalevyn täytyy sopia mukavasti avanteen ympärille. Ohivuotojen ehkäisemiseksi on tärkeää varmistaa, että pohjalevy istuu tiiviisti avanteen ympärillä. Silitä sormin tai painele kevyesti pohjalevy ihoon kiinni aloittaen avanteen juuresta. Kuljeta sormia avanteen ympäri ja varmista siten, että pohjalevy on tarttunut hyvin ihoon joka puolelta. Silitä pohjalevyä avanteen juuresta ulkoreunoja kohti ja varmista, että pohjalevy on hyvin kiinni ihossa.



Painele pussia, jotta pohjalevy kiinnittyy ja muotoutuu täydellisesti ihoon avanteen ympärillä.

Pussin tyhjentäminen

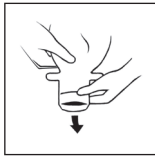


Avaa tyhjennysosa ja tyhjennä pussi tarpeen mukaan WC-pönttöön.



Puhdista tyhjennysosa esim. WC-paperilla. Taita ja kiinnitä tyhjennysosa uudelleen pussin tyhjentämisen jälkeen.

Poistaminen

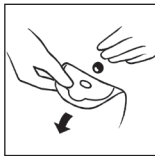

Poista pussi varovasti vetämällä pohjalevyn poistokorvaketta irti ihosta ja vieritä pohjalevyä hitaasti alaspäin. Paina ihoa kevyesti vapaalla kädelläsi irrottamisen helpottamiseksi.

Hävittäminen

Tuote on tarkoitettu vain kertakäyttöön, ja se on hävitettävä paikallisten ohjeiden mukaisesti esim. normaalin talousjätteen mukana.

Älä huuhtele tuotetta alas WC:stä.

Suodatintarra



Kiinnitä tarvittaessa yksi suodatintarroista suodattimen päälle estämään kaasun pääsyä ulos pussista.

Vaaratilanteista ilmoittaminen

Jos tämän laitteen käytön aikana tai sen käytön seurauksena tapahtuu vakava vaaratilanne, siitä on ilmoitettava valmistajalle ja kansallisille viranomaisille.

Symbolien merkitykset



Lääketieteellinen ja kirurginen laite



Osoittaa, että tuote noudattaa Euroopan lääketieteellisiä ja kirurgisia laitteita koskevaa lainsäädäntöä



Luettelonumero



Viimeinen käyttöpäivä (VVVV-KK-PP)



Eräkoodi



Valmistuspäivämäärä (VVVV-KK-PP)



Valmistaja



Lue käyttöohje



Ei saa käyttää uudelleen



Osoittaa merkinnän, joka sisältää yksilöllisen laitetunnisteen



(Global Trade Item Number) Kauppanimikkeen maailmanlaajuinen yksilöity numero



Suojattava suoralta auringonvalolta



Tämä puoli ylöspäin



Kierrätettävä pakkausmateriaali



Turvallinen MRI-laitteen kanssa