

# SenSura<sup>®</sup> Mio Concave

**Gewölbter Stomabeutel**

Einteiliger geschlossener  
Beutel



**Gebrauchsanweisung**

## **Verwendungszweck**

Der Stomabeutel ist für das Auffangen der Ausscheidungen aus einem Stoma vorgesehen. Der Hautschutz haftet auf der intakten peristomalen Haut und dient zur Positionierung von Stomabeuteln.

## **Indikation**

Das Produkt ist für Menschen mit einem künstlichen Darmausgang (Stoma) indiziert.

## **Warnhinweise**

Eine Wiederverwendung dieses Produkts für den Einmalgebrauch wird aufgrund des Risikos von Kreuzkontamination nicht empfohlen.

Wiederaufbereiten, Waschen, Desinfektion und/oder (Re-)Sterilisation können die Produktmerkmale beeinträchtigen und ein zusätzliches Körperverletzungs- oder Infektionsrisiko für den Anwender verursachen.

## **Information**

Stomabeutel zum Einmalgebrauch.

Die Produkte sollen bis zum Gebrauch in der Verpackung aufbewahrt werden, da die Verpackung die Produkte schützt. Das Etikett auf der Verpackung enthält wichtige Informationen wie Chargennummer, Verfalldatum und einen eindeutigen Strichcode.

Das Produkt muss vor einer Untersuchung im Kernspintomografen nicht entfernt werden, da es MR-sicher ist.

Coloplast übernimmt keine Haftung für jegliche Verletzungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

## **Besondere Aufbewahrungsbedingungen**


Bewahren Sie das Produkt in horizontaler Lage auf.

Vor direktem Sonnenlicht schützen.

## **Meldung von Zwischenfällen**

Wenn es während oder infolge der Anwendung dieses Produkts zu einem schweren Zwischenfall kommt, melden Sie dies bitte dem Hersteller und der entsprechenden Behörde Ihres Landes.


# Produktmerkmale

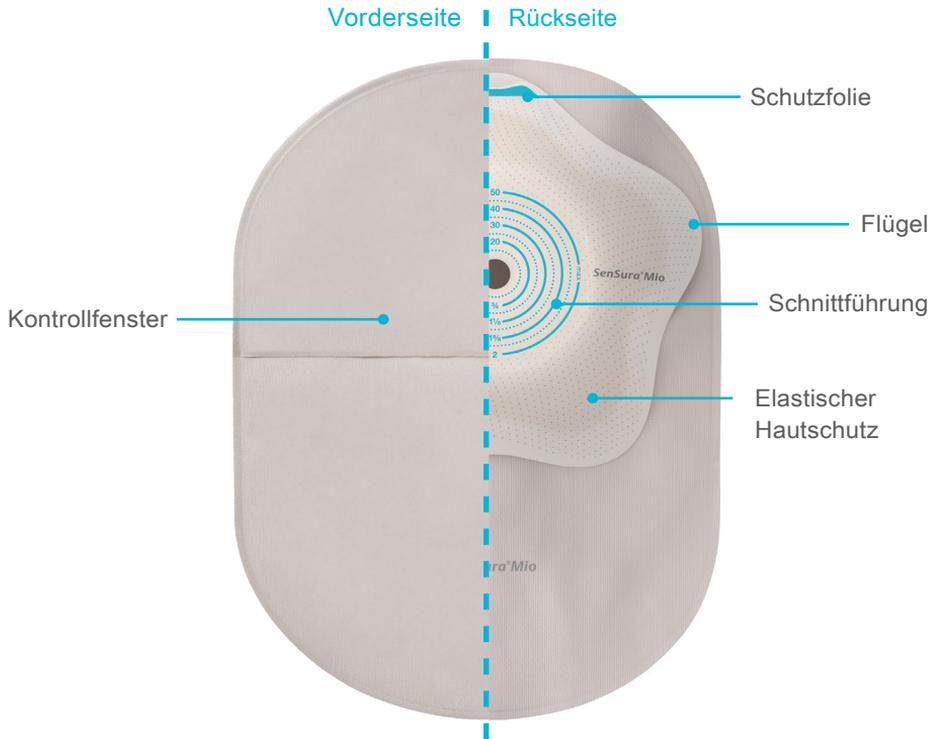

# Anwendung

## Vorbereiten

1

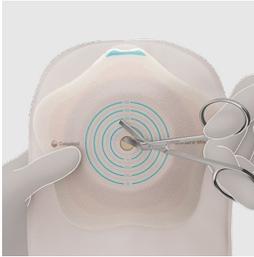

Anschließend eine Öffnung in der Größe und Form des Stomas zuschneiden. Zum Ausschneiden empfiehlt sich eine gebogene Schere.

Sie können mit der beiliegenden Stomaschablone Größe und Form des Stomas ausmessen.

Die Form Ihres Stomas kann sich verändern; daher wird empfohlen, das Stoma auszumessen, wenn es am größten ist. Dies ist oft im Sitzen der Fall.

Um Undichtigkeiten und Hautprobleme zu vermeiden, muss die Öffnung exakt um das Stoma herum abschließen.


2



Die stomaumgebende Haut gründlich reinigen. Vor dem Anbringen der Basisplatte muss die Haut sauber und trocken sein.

## Applizieren

3

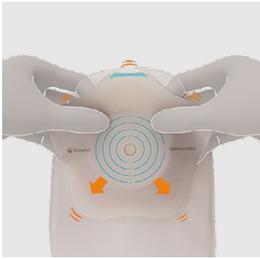

Um den Hautschutz für das Anbringen vorzubereiten, stülpen Sie alle 5 Flügel nach oben um.

4



Ziehen Sie die Schutzfolie vom Hautschutz ab.

5



Halten Sie den Hautschutz mit den zurückgeschlagenen Flügeln fest. Richten Sie den mittleren Bereich des Hautschutzes um das Stoma herum aus. Drücken Sie den mittleren Bereich vorsichtig auf die Haut. Klappen Sie dann die Flügel über den äußeren Bereich herunter.

6



Drücken Sie den Hautschutz von der Mitte aus rundum fest auf die Haut.

7



Ertasten Sie mit dem Zeigefinger den weichen Stabilitätsring, der um Ihr Stoma liegt. Drücken Sie den Hautschutz vorsichtig zwischen dem Ring und Ihrem Stoma (oder direkt auf dem Stabilitätsring) vorsichtig auf die Haut, damit der mittlere Bereich des Hautschutzes dicht mit der Haut verbunden ist.

8



Drücken Sie den Hautschutz in mehreren Richtungen von der Mitte nach außen an, damit er fest auf der Haut um das Stoma haftet.

## Filterabdeckung



Wenn Sie vorübergehend verhindern möchten, dass Gas aus dem Beutel austritt, verschließen Sie den Filter mit einem der beiliegenden Filteraufkleber. Wird der Filter über längere Zeit verschlossen, bläht sich der Beutel auf; daher sollte dies nur kurzzeitig geschehen.



Gebrauchsanweisung auch als Video erhältlich

Das Video mit Anweisungen können Sie ansehen, indem Sie den QR-Code scannen, oder unter:

<http://de.coloplast.at/SenSuraMioConCave1piececlosed>

# Entfernen



Entfernen Sie die Basisplatte von der Haut, indem Sie sie langsam und vorsichtig nach unten abziehen und dabei gleichzeitig mit der anderen Hand die Haut gespannt halten um Gegendruck auf den Bauch auszuüben.

Üben Sie gleichzeitig mit der freien Hand etwas Gegendruck auf die Haut aus.

# Entsorgung

Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und sollte gemäß den gültigen Richtlinien, z.B. zusammen mit dem normalen Hausmüll, entsorgt werden.

Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

# Umgang mit wiederkehrenden Problemen



## **Der Hautschutz haftet nicht richtig auf der Haut**

Befolgen Sie bitte unbedingt die Anweisungen zum Anbringen des Produkts in dieser Broschüre und achten Sie darauf, dass die Haut vor dem Anbringen komplett sauber und trocken ist. Es ist wichtig, dass der Hautschutz auf allen Falten und Furchen der Haut fest angebracht ist. Drücken Sie den Hautschutz beim Anbringen an, damit er ausreichend haftet.



## **Die Haut unter der Basisplatte ist gerötet und/oder gereizt**

Gereizte Haut kann viele Ursachen haben. Hautreizungen können durch Leckagen aufgrund der Verwendung des falschen Systems oder aufgrund der Verwendung einer Schnittvorlage der falschen Größe hervorgerufen werden. Sie können aber auch Folge einer unzureichenden Reinigung oder zu schnellen Entfernung des Hautschutzes sein, wodurch die Haut stark beansprucht wird. Ist die Haut gerötet, ist eventuell ein Pflasterentferner hilfreich. Sprechen Sie möglichst bald mit Ihrer Stomaschwester über das Problem.



## **Leckagen unter dem Hautschutz**

Leckagen können viele Ursachen haben. Sie können entstehen, weil sich Körper oder Stoma in Form oder Größe verändern, oder weil der Hautschutz nicht korrekt angebracht ist. Unter [www.bodycheck.coloplast.com](http://www.bodycheck.coloplast.com) können Sie mit dem Online-Tool „Mein StomabauchCheck“ selbst beurteilen, ob sich Ihr Körperprofil verändert hat. Falls dem so ist, benötigen Sie vielleicht ein anderes System oder könnten von einem Hilfsprodukt profitieren. Es ist wichtig, dass Sie möglichst bald mit Ihrer Stomaschwester über das Problem sprechen.

# Erläuterung der Symbole



Medizinprodukt



Nicht wiederverwenden



Weist darauf hin, dass das Produkt der europäischen Gesetzgebung für Medizinprodukte entspricht



Bedeutet, dass der Strichcode eine Unique Device Identification enthält



Katalognummer



(Global Trade Item Number)  
Globale Artikelidentnummer



Verfalldatum (JJJJ-MM-TT)



Vor direktem Sonnenlicht schützen



Chargennummer



Hier oben



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Wiederverwertbare Verpackung



Hersteller



MR-sicher



Gebrauchsanweisung beachten



Coloplast A/S  
Hølltedam 1  
3050 Humlebaek  
Denmark

## Gebrauchsanweisung

23327641 Version 2

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten. © 2021-05-04

