Die Stomaversorgung ist dafür bestimmt, Ausscheidungen aus einem Stoma passiv aufzunehmen. Die Hautschutz-Basisplatte wird an der Stomaversorgung befestigt und ist dafür bestimmt, an der intakten Haut rund um das Stoma zu haften.

Das Produkt ist für Menschen mit einem Stoma indiziert.

Warnhinweise

Eine Wiederverwendung dieses Einwegprodukts wird nicht empfohlen, da eine Kreuzkontamination auftreten kann, die möglicherweise zu einer lokalen Infektion führt.

Die Wiederaufbereitung, Reinigung, Desinfektion und/oder (Re-)Sterilisation kann die Produktmerkmale beeinträchtigen und somit ein zusätzliches Risiko einer körperlichen Schädigung oder Infektion des Patienten darstellen.

Stoma-Basisplatte für den Einmalgebrauch

Die Produkte sind bis zur Entnahme zur Verwendung im Karton aufzubewahren, da der Karton die Produkte schützt und das Kartonetikett wichtige Informationen wie Chargennummer, Verfallsdatum sowie einen eindeutigen Strichcode enthält.

Das Produkt muss vor einer MRT-Untersuchung nicht abgenommen werden, da es MR-sicher ist.

Coloplast schließt jede Haftung für Verletzungen oder Schäden aus, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

Besondere Lagerungsbedingungen Lagern Sie das Produkt in horizontaler Position.

Vor Sonnenlicht schützen.

Falls es während bzw. durch die Anwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall gekommen ist, melden Sie diesen bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde in Ihrem Land.

Anwendungshinweise


Vorbereiten



Mit einer kleinen gebogenen Schere und mithilfe der Messschablone auf der Basisplatte ein Loch in die Basisplatte schneiden und es in Größe und Form exakt dem Stoma anpassen. Größe und Form des Stomas auf der Stomaschablone mit einem Stift markieren.

Die Form Ihres Stomas kann sich verändern: daher empfehlen wir, das Stoma zu messen, wenn es am größten ist. Dies ist häufig der Fall, wenn Sie sitzen.

Um Undichtigkeiten und Hautprobleme zu vermeiden, muss die Öffnung in der Haftfläche exakt um das Stoma herum abschließen.

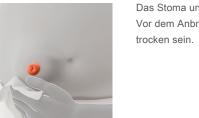

Das Stoma und die Stoma umgebende Haut gründlich reinigen. Vor dem Anbringen der Basisplatte muss die Haut sauber und

Applizieren



Drehen Sie alle 5 Seitenblätter um, um die Basisplatte für die Anwendung vorzubereiten.



Entfernen Sie die Schutzfolie von der Basisplatte.




den außen gewölbten Bereich.

Halten Sie Basisplatte mit nach hinten gefalteten

Drücken Sie den mittleren Teil vorsichtig auf die Haut.

Seitenblättern.

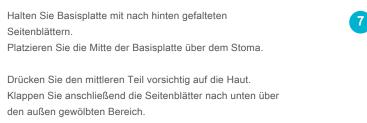

Platzieren Sie Ihren Zeigefinger in dem Kopplungsring, der Ihr Stoma umgibt. Üben Sie vorsichtig Druck auf die Basisplatte zwischen dem Kopplungsring und Ihrem Stoma aus, um sicherzustellen, dass der mittlere Teil der

Basisplatte eine sichere Abdichtung mit der Haut aufweist.





Üben Sie von der Mitte der Basisplatte aus in diverse Richtungen nach außen Druck aus, um die Adhäsion zwischen der Basisplatte und der das Stoma umgebenden Haut zu gewährleisten.






Vor dem Anbringen des Beutels sicherstellen, dass die Basisplatte sauber ist. Prüfen Sie, dass der Rastring offen

Richten Sie die Unterseite der Beutelkopplung mit der Unterseite der Basisplattenkopplung aus.

Produktmerkmale

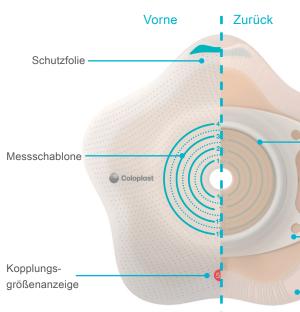

schlaufe

Seitenblatt



Entfernen

Verbinden Sie den Beutel und die Basisplatte von unten mit beiden Mittelfingern.





Schieben Sie Ihre Zeigefinger nach oben und üben Sie leichten Druck auf die Oberseite der Kopplung aus, bis Sie fühlen, dass der Beutel sicher an der Basisplatte befestigt




Schließen Sie den Verschlussring, indem Sie den Verschluss zusammendrücken. Sobald ein deutliches Klicken zu hören ist, ist der Beutel sicher mit der Basisplatte verbunden.

Ziehen Sie sanft am Beutel, um sicherzustellen, dass dieser vorschriftsgemäß befestigt ist.



Mit der Fingerspitze auf die Ihrem Bauch zugewandte kleine türkisfarbene Lasche drücken, um den Rastring zu öffnen.

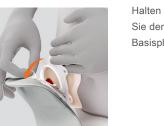

Halten Sie die Abziehlasche des Beutels fest und nehmen Sie den Beutel ab, indem Sie den Beutel vorsichtig von der Basisplatte abziehen.



Die Basisplatte vorsichtig entfernen, indem die Abziehlasche an der Basisplatte vom Bauch weggezogen und die Basisplatte langsam nach unten gerollt wird.

Gleichzeitig mit der freien Hand die Haut gespannt halten und etwas Gegendruck auf die Haut auf dem Bauch

Entsorgung

Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und sollte gemäß den örtlichen Richtlinien, z. B. zusammen mit dem normalen Hausmüll, entsorgt werden.

Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

Weitere Informationen auf dem Beutel

Weitere Informationen zur Verwendung des Beutels finden Sie in der Gebrauchsanweisung, die im Verkaufskarton für die Beutel enthalten ist.



Eine Gebrauchsanweisung steht ebenfalls als

Symbolerklärung



Handhabung von wiederkehrenden Problemen

Befolgen Sie unbedingt die Anwendungsanleitung in dieser Broschüre und

ist. Es ist wichtig, dass ein vollständiger Kontakt zwischen der Basisplatte und

Eine Hautreizung kann diverse Ursachen haben. Sie kann durch Undichtigkeiten

verursacht werden, wenn die falsche Vorrichtung oder eine Schneidvorlage der

empfehlenswert. Besprechen Sie dieses Anliegen sobald wie möglich mit Ihrem

unzureichenden Reinigung oder schnellen Entfernung des Hautschutzes sein, was die Haut belasten kann. Wenn die Haut rot ist, ist möglicherweise ein Hautschutzentferner

Undichtigkeiten können diverse Ursachen haben. Es kann durch eine Veränderung der

Form oder Höhe des Körpers oder des Stomas oder mit einer fehlerhaften Anbringung

Ist dies der Fall, benötigen Sie möglicherweise eine andere Vorrichtung oder Sie

könnten von einem Unterstützungsprodukt profitieren. Besprechen Sie dieses

Anliegen sobald wie möglich mit Ihrem Stomatherapeuten.

der Basisplatte verursacht werden. Ziehen Sie den Mein StomabauchCheck-Selbsttest unter www.bodycheck.coloplast.com in Betracht, um zu sehen, ob sich Ihr Körperprofil

falschen Größe verwendet wird. Sie kann allerdings auch das Ergebnis einer

vergewissern Sie sich, dass die Haut vor dem Anbringen komplett sauber und trocken

sämtlichen Hautfurchen besteht. Drücken Sie beim Anbringen auf die Basisplatte, um

Die Basisplatte haftet nicht vorschriftsgemäß an der Haut

Die Haut unter der Basisplatte ist rot und/oder gereizt

für eine ausreichende Adhäsion zu sorgen.

Undichtigkeiten unter der Basisplatte

Stomatherapeuten.

MD Medizinprodukt

Einhaltung der europäischen

REF Katalognummer



Verfalldatum (JJJJ-MM-TT)



LOT Chargennummer / LOT-Nummer



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Gebrauchsanweisung befolgen



Nur für den einmaligen Gebrauch

Zeigt einen Datenträger mit



Informationen zur einheitlichen Produktkennzeichnung für Medizinprodukte an



(Global Trade Item Number)
Globale Artikelnummer



Vor Sonnenlicht schützen



Recyclingfähige Verpackung



MR MR-sicher

Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebaek Denmark

Gebrauchsanweisung

23327842 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S


Alle Rechte vorbehalten.© 2021-07-29

Coloplast

SenSura[®]**Mio** Concave

Click Konkave Stoma Basisplatte

2-teilige Basisplatte zum Einklicken

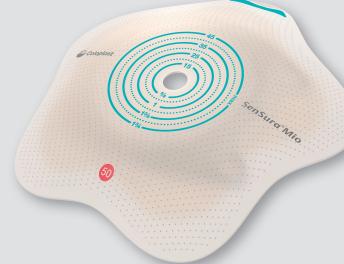

Gebrauchsanweisung