

Productbeschrijving

Het stomazakje is bedoeld om output van een stoma passief op te vangen. De zelfklevende huidplaat wordt op de intacte huid rond de stoma gekleefd en daarop wordt het stomazakje bevestigd.

Indicatie

Het hulpmiddel is aangewezen voor mensen met een stoma.

Waarschuwingen

Hergebruik van het product voor eenmalig gebruik is niet aangewezen aangezien kruisbesmetting kan optreden, wat tot lokale infectie kan leiden.

Recyclen, wassen, ontsmetten en/of (her)steriliseren kunnen de productkenmerken aantasten, wat voor de gebruiker een bijkomend risico op lichamelijk letsel of infectie inhoudt.

Informatie

Stomahuidplaat voor eenmalig gebruik.

Het is de bedoeling de producten te bewaren in de doos tot deze voor gebruik verwijderd worden, aangezien de doos de producten beschermt en er op de sticker van de doos belangrijke informatie zoals lotnummer, vervaldatum en een unieke streepjescode staat.

Het hulpmiddel hoeft niet verwijderd te worden voor een MRI-scan, aangezien het MRI-veilig is.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.

Bijzondere bewaarcondities

Product horizontaal bewaren.

Niet blootstellen aan zonlicht.


Melden van incidenten

Als er zich een ernstig incident voordoet tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als resultaat van het gebruik, gelieve dit dan aan de fabrikant en aan uw nationale autoriteit te melden.

Het product gebruiken

Voorbereiden

1

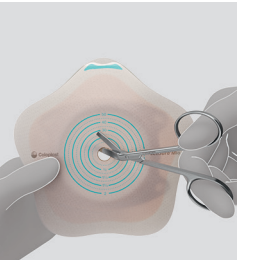


Knip met een kleine, gebogen schaar en door de stippellijn op de huidplaat te volgen een opening in de huidplaat met precies dezelfde grootte en vorm als de stoma.

U kunt de grootte en de vorm van de stoma meten met het bijgeleverde stomameterijtje.

De vorm van uw stoma kan veranderen, dus wordt aanbevolen dat u hem meet wanneer hij op zijn grootst is. Dit is vaak wanneer u zit.

2

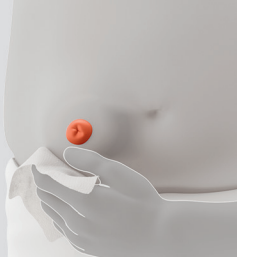


Een goede aansluiting van de opening rond de stoma is belangrijk om het risico op lekkage en huidproblemen te verminderen.

Reinig de stoma en de omliggende huid grondig. Zorg ervoor dat de huid volledig droog is voordat u de huidplaat aanbrengt.


Aanbrengen

3

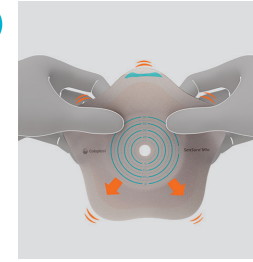


Klap alle 5 uiteinden om ter voorbereiding van het aanbrengen van de huidplaat.

4

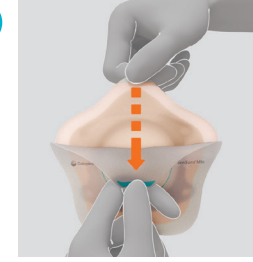

Verwijder de beschermfilm van de huidplaat.

5

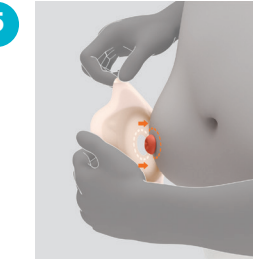


Pak de huidplaat vast met de uiteinden naar achteren gevouwen.

Lijn het middengedeelte van de huidplaat rond de stoma uit.

Druk het middengedeelte voorzichtig op de huid.

Klap de uiteinden dan om over het gebolde gebied.

6

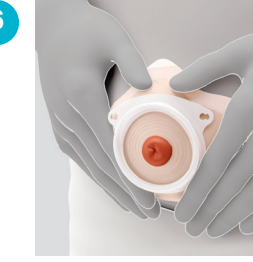


Druk de huidplaat vanuit het midden naar buiten stevig op de huid.

7



Plaats uw wijsvinger binnenin de koppelingsring die zich rondom uw stoma bevindt. Oefen voorzichtig druk uit op de huidplaat tussen de koppelingsring en uw stoma om ervoor te zorgen dat het middengedeelte van de huidplaat goed aansluit op de huid.

8

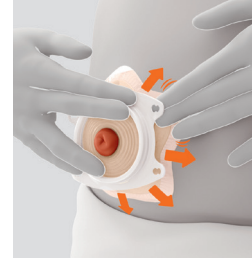

Oefen druk uit vanuit het middengedeelte van de huidplaat naar buiten toe in meerdere richtingen om de aanhechting tussen de huidplaat en de huid rond de stoma veilig te stellen.


9



Zorg ervoor dat de huidplaat schoon is voordat u het zakje aanbrengt. Controleer of de borging open is.

Lijn de onderkant van de koppeling van het zakje uit met de onderkant van de koppeling van de huidplaat.

Productkenmerken

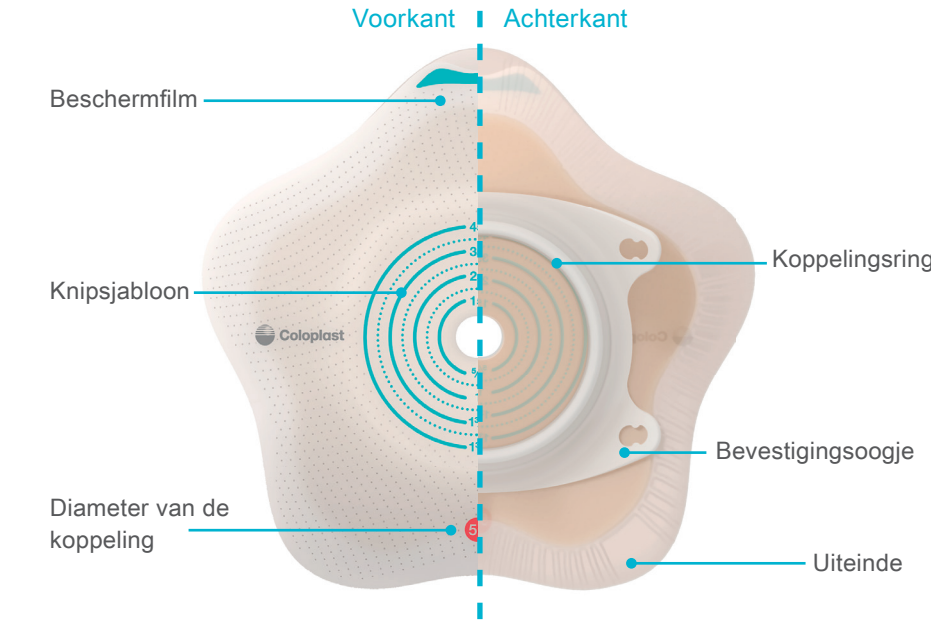


10




Druk het zakje en de huidplaat vanaf de onderkant aan.
Gebruik hiervoor de middelste vingers.

11

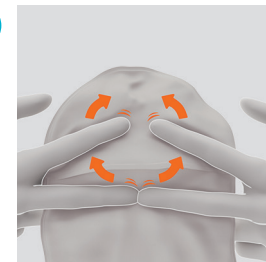

Maak een draaibeweging met uw wijsvingers naar boven en oefen zachte druk uit op de bovenkant van de koppeling **tot u voelt dat het zakje stevig is bevestigd** aan de huidplaat.


12

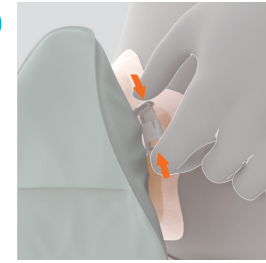


Sluit de borgring door de borgring samen te drukken. Het zakje is stevig aan de huidplaat bevestigd wanneer u een klikgeluid hoort.

Trek voorzichtig aan het zakje om te controleren of het juist bevestigd is.


Verwijderen

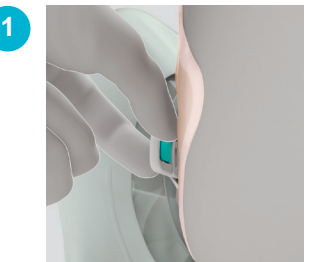

Open de borgring door met de vingertop op het kleine turquoise lipje dat naar uw buik wijst te drukken.

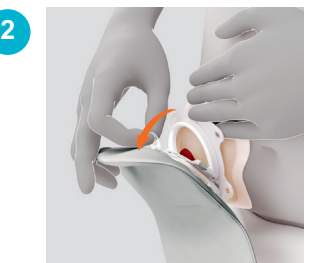

Houd het verwijderingslipje vast en verwijder het zakje door het **voorzichtig weg te trekken** van de huidplaat.

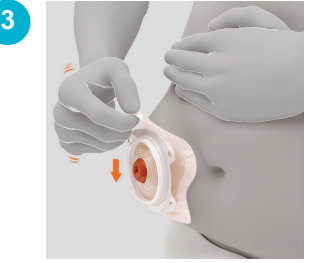

Trek het aftreklipje van de huidplaat voorzichtig weg van de buik en rol de huidplaat langzaam naar beneden om ze te verwijderen.

Druk met uw vrije hand lichtjes tegen uw huid om het verwijderen te vergemakkelijken.

Weggoeien afval

Het product is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik en moet volgens de plaatselijke richtlijnen worden weggegooid met het normale huishoudelijke afval.

Spoel het product niet door het toilet.

Meer informatie over het zakje

Meer informatie over het gebruik van het zakje vindt u in de gebruiksinstructie bij de winkelverpakking voor de zakjes.



Gebruiksaanwijzingen ook beschikbaar op video

Om de instructievideo te zien kunt u de QR-code scannen of gaat u naar nl.coloplast.be/gebruik-Concave-2deligPlaat

Omgaan met terugkerende problemen

?

De huidplaat plakt niet goed aan de huid

Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzingen in deze bijsluiter volgt en zorg ervoor dat uw huid schoon en volledig droog is voordat u de huidplaat aanbrengt. Het is belangrijk dat er volledig contact is tussen de huidplaat en elke groef in de huid. Voer druk uit op de huidplaat bij het aanbrengen om voor voldoende aanhechting te zorgen.

?

De huid is rood en/of geïrriteerd onder de huidplaat

Geïrriteerde huid kan veel oorzaken hebben. Het kan worden veroorzaakt door lekkage door het niet gebruiken van het juiste opvangmateriaal of het verkeerd uitknippen van de huidplaat. Het kan ook het gevolg zijn van onvoldoende reiniging of snelle verwijdering van de huidplaat, dat de huid kan belasten. Als de huid rood is kan een Adhesive Remover nuttig zijn. Bespreek het probleem zo snel mogelijk met uw professionele zorgverlener.

?

Lekkage onder de huidplaat

Lekkage kan meerdere oorzaken hebben. Het kan een gevolg zijn van de veranderende vorm van het lichaam of van de stoma, of het onjuist aanbrengen van de huidplaat. Overweeg de online BodyCheck-zelfbeoordelingstest te doen op www.bodycheck.coloplast.com om te zien of uw lichaamsprofiel is veranderd. Als dat het geval is, hebt u wellicht een ander opvangmateriaal nodig, of u zou kunnen profiteren van een ondersteunend product. Bespreek het probleem zo snel mogelijk met uw stomaverpleegkundige.

Verklaring van de symbolen



Medisch hulpmiddel



Geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen



Referentienummer



Vervaldatum (JJJJ-MM-DD)



Lotnummer



Fabricagedatum (JJJJ-MM-DD)



Fabrikant



Gebruiksaanwijzing raadplegen



Niet opnieuw gebruiken



Wijst op een drager die informatie over unieke productidentificatie bevat



(Global Trade Item Number) Wereldwijd handelsartikelnummer



Niet blootstellen aan zonlicht



Deze kant boven



Recyclebare verpakking



MRI-veilig



Gebruiksaanwijzing

23327843 Version 1

Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. Alle rechten voorbehouden. © 2021-08-02



Coloplast

SenSura[®]Mio Concave

Concave stoma huidplaat

2-delig click-huidplaat



Gebruiksaanwijzing