

Utilisation prévue

La poche pour stomie est destinée à recueillir passivement les effluents d'une stomie. Le protecteur cutané adhésif est attaché à la poche pour stomie et est conçu pour adhérer à la peau intacte entourant la stomie.

Indications

Le dispositif est indiqué pour les personnes stomisées.

Avertissements

La réutilisation de ce produit à usage unique n'est pas recommandée, car une contamination croisée pourrait se produire, entraînant potentiellement une infection locale.

Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et/ou la (re)stérilisation peuvent compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de dommage corporel ou d'infection pour le patient.

Informations

Protecteur cutané pour stomie à usage unique.

Les produits sont conçus pour être conservés dans leur boîte jusqu'à leur utilisation, car la boîte les protège et l'étiquette sur la boîte contient des informations importantes telles que le numéro de lot, la date de péremption et un code-barres unique.

Il n'est pas nécessaire de retirer le dispositif avant une IRM car il est compatible avec l'IRM.

Coloplast ne peut être tenu responsable des dommages pouvant résulter de l'emploi de ce produit dans des conditions non conformes aux instructions de la notice d'utilisation.

Conditions particulières de conservation

Conserver le produit à l'horizontale.


Garder à l'abri de la lumière du soleil.

Signalement des incidents

Si un incident grave s'est produit au cours de l'utilisation de ce dispositif ou suite à son utilisation, le signaler au fabricant et aux autorités nationales compétentes.

Mode d'application et de retrait

Préparation

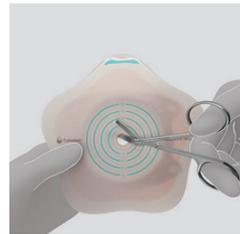

Découper dans le protecteur cutané un trou de la taille et de la forme de la stomie au moyen de petits ciseaux incurvés et en suivant les lignes de découpe sur l'adhésif.

On peut utiliser le guide de mesure de la stomie qui est inclus pour mesurer la taille et la forme de la stomie.


La forme de la stomie peut changer. Il est donc recommandé de la mesurer lorsqu'elle est la plus large. Elle est souvent plus large en position assise.

Une bonne adaptation entre le trou et la stomie est importante pour réduire les risques de fuites et les problèmes de peau.


Nettoyer soigneusement la stomie et la peau environnante. La peau doit être parfaitement sèche avant l'application du protecteur cutané.




Application

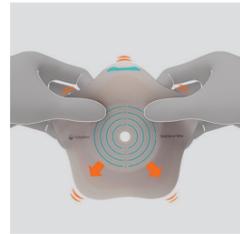


Plier les 5 pétales pour préparer l'application du protecteur cutané.

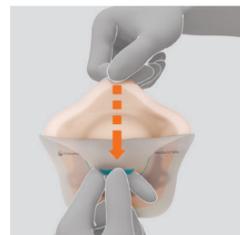

Retirer le film de protection du protecteur cutané.

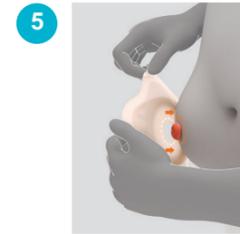

Tenir le protecteur cutané en repliant les pétales vers l'arrière. Aligner la partie centrale du protecteur cutané autour de la stomie.

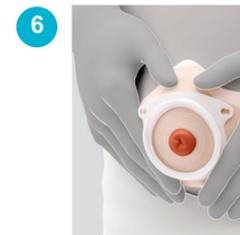


Appuyer avec précaution la partie centrale contre la peau. Puis, abaisser les pétales pour les appliquer sur la surface bombée.


Coller fermement le protecteur cutané sur la peau, en appuyant du centre vers l'extérieur.



Placer l'index dans l'anneau de couplage qui entoure la stomie. Appliquer une légère pression sur le protecteur cutané entre l'anneau de couplage et la stomie pour s'assurer que la partie centrale du protecteur cutané crée une parfaite étanchéité avec la peau.

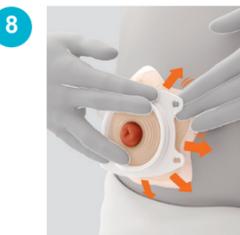


Appliquer une pression du centre du protecteur cutané vers l'extérieur, dans plusieurs directions, pour assurer une bonne adhérence entre le protecteur cutané et la peau entourant la stomie.

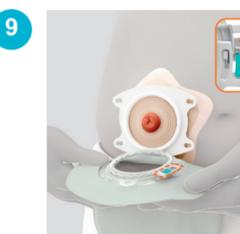

Avant d'appliquer la poche, s'assurer que le protecteur cutané est propre. Vérifier que la bague de fixation est ouverte.

Aligner le bas de l'anneau de la poche avec le bas de l'anneau du protecteur cutané.

Caractéristiques du produit

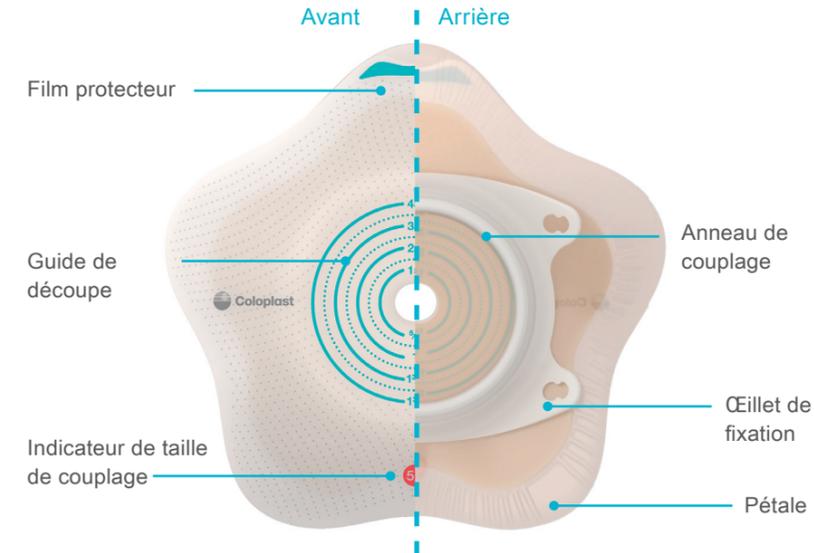


10




Fixer la poche et le protecteur cutané l'un dans l'autre à partir du bas avec les majeurs.

11

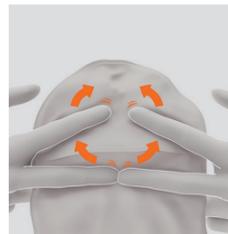

Faire glisser les index vers le haut et appliquer une légère pression vers le haut du couplage **jusqu'à ce que la poche soit correctement fixée** sur le protecteur cutané.

12

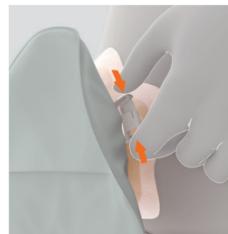

Fermer la bague de fixation en appuyant dessus. La poche est correctement fixée au protecteur cutané lorsqu'un clic est émis.

Tirer doucement sur la poche pour vérifier qu'elle est bien fixée.

Retrait

1



Appuyer du bout du doigt sur la petite languette turquoise placée face au ventre pour ouvrir la bague de fixation.

2



Maintenir la languette de retrait de la poche et retirer la poche en la **détachant délicatement** du protecteur cutané.

3



Retirer délicatement le protecteur en tirant sur la languette de retrait pour l'éloigner du ventre, dans un mouvement de déroulement vers le bas.

Avec la main libre, appliquer une légère pression sur la peau pour faciliter le retrait.

Élimination

Le produit est destiné à un usage unique exclusivement et doit être éliminé conformément aux directives locales, par ex. avec les déchets ménagers normaux.

Ne pas jeter le produit dans les toilettes.

Plus d'informations sur la poche

Pour en savoir plus sur l'utilisation de la poche, consulter le mode d'emploi fourni avec la boîte contenant les poches.



Le mode d'emploi est également disponible en vidéo

Pour visionner la vidéo d'instructions, scanner le QR code ou consulter le site fr.coloplast.be/utilisation-Concave-2piecesPlaques

Gérer les problèmes les plus fréquents

?

Le protecteur cutané n'adhère pas correctement à la peau

Suivre attentivement les instructions relatives à l'application contenues dans cette brochure et s'assurer que la peau est parfaitement propre et sèche avant l'application. Il est important que le protecteur cutané soit entièrement en contact avec chaque pli cutané. Exercer une pression sur le protecteur cutané pendant son application pour assurer une adhérence suffisante.

?

La peau est rouge et/ou irritée sous le protecteur cutané

Une irritation cutanée peut avoir de nombreuses causes. Elle peut être due à une fuite en raison de l'utilisation d'un appareillage inadéquat ou d'une mauvaise découpe. Mais elle peut également être la conséquence d'un nettoyage insuffisant ou d'un retrait rapide du protecteur qui a pu endommager la peau. Si la peau est rouge, un dissolvant d'adhésif peut être utile. Discuter du problème avec un professionnel de santé dès que possible.

?

Fuite sous le protecteur cutané

Une fuite peut avoir de nombreuses causes. Elle peut résulter de la modification de la forme ou de la taille du corps ou de la stomie, ou de l'application incorrecte du protecteur cutané. Penser à utiliser l'auto-évaluation en ligne BodyCheck sur www.bodycheck.coloplast.com pour déterminer si la morphologie a changé. Si tel est le cas, un appareillage différent peut être nécessaire, ou l'utilisation d'un produit de soutien pourrait être bénéfique. Discuter du problème avec l'infirmière stomathérapeute dès que possible.

Explication des symboles

MD

Dispositif médical

CE

Indique que le produit est conforme à la législation européenne sur les dispositifs médicaux

REF

Référence catalogue

Date de péremption (AAAA-MM-JJ)

Date de péremption (AAAA-MM-JJ)

LOT

Numéro de lot

Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)

Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)

Fabricant

Fabricant

i

Consulter le mode d'emploi

Ne pas réutiliser

UDI

Présente un support qui comporte l'identifiant unique du dispositif

GTIN

(Global Trade Item Number) Code article international

Garder à l'abri de la lumière du soleil

Garder à l'abri de la lumière du soleil

↑↑

Haut

Emballage recyclable

Emballage recyclable

MR

Compatible avec l'IRM

CE

Coloplast A/S
Holtødalen 1
3050 Humlebaek
Denmark

Mode d'emploi

23327844 Version 1

Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S. Tous droits réservés. © 2021-08-02



SenSura[®] Mio Concave

Protecteur cutané concave

Protecteur cutané 2-pièces Click



Mode d'emploi