

SenSura[®]Mio



使用说明
准备

SenSura[®]Mio Convex

产品名称：造口袋

一件式尿路造口袋

型号：16867，16837，16810，10586



说明书版本编号：23328731

Coloplast徽标是Coloplast A/S的注册商标。版权所有。©

说明书修订日期：2021-08-11

备案号/产品技术要求编号：国械备20190945号

备案人名称/生产企业名称：康乐保公司 Coloplast A/S

备案人住所/生产企业住所：Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark

备案人联系方式/生产企业联系方式：+45 4911 1111

生产地址：Kerek utca 4, 2800 Tatabánya, Hungary

代理人名称/售后服务单位：康乐保（中国）医疗用品有限公司

代理人住所：北京市朝阳区丽都花园路5号院1号楼13层1301-1306单元

代理人联系方式：

电话：010-5920 1888

传真：010-5920 1898

康乐保客户服务热线

热线电话：400 700 7668

网 址：www.coloplast.com.cn

生产日期和使用期限：见包装标签

产品有效期：两年

原产地：匈牙利

结构及组成

本产品是一件式造口袋，包括肠造口袋和尿路造口袋。肠造口袋为开口袋，由袋身、底盘、排放口和环形过滤器组成。尿路造口袋由带抗返流结构的袋身、底盘和排放阀组成。其中底盘分为平面底盘、深凸底盘、微凸底盘和软凸底盘。底盘由双层黏胶、曲面网状结构（不适用于平面底盘）、移除凸耳、顶层薄膜和黏胶保护纸组成。非无菌形式提供，一次性使用。

适用范围/预期用途

本产品用于造口排泄物的收集。

产品描述

本产品为回肠、结肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤。非无菌提供。

储存条件

水平放置，避免日晒。

信息

一次性使用造口底盘。

产品在打开使用前存储在盒子中，盒子可以保护产品。盒子上的标签中包含了重要的信息，如批次代码，使用期限和唯一编码。

该产品在磁共振扫描前不需要移除，因为它对于磁共振是安全的。

康乐保公司对于不遵守本使用说明而造成的一切损伤和损失不负责任。

注意事项

在开始使用深凸产品之前，请咨询您的医护人员。

警告

一次性产品重复使用可能发生交叉污染，导致局部感染。

再处理、清洗、消毒和/或灭菌可能损害产品性能，从而对使用者造成更多的人身伤害或增加感染风险。

禁忌症

暂无。



用弯剪根据底盘上的剪切线，在底盘中心剪孔，使之与造口的大小和形状完全匹配。
可以使用附赠的造口测量尺测量造口的大小和形状。
为了减少渗漏和皮肤问题，孔径和造口完全匹配是非常重要的。




彻底清洁造口和周围皮肤，粘贴底盘前，确保皮肤完全干燥。

佩戴




去除黏胶保护纸。

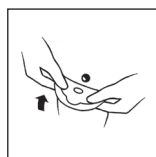

将底盘对准造口，平整地贴在皮肤上。
黏胶必须紧密贴合于造口周围。为了防止渗漏，确保造口周围密封是很重要的。当按压腹部的底盘/造口袋时，先从造口周围开始，按压底盘黏胶，使其紧贴皮肤。用手指按压造口周围一圈，确保黏胶已紧密贴合。向下抚平黏胶，从造口向底盘边缘按压，保证黏胶与皮肤完全接触。




对造口袋施加压力以确保快速黏合，并让黏胶与造口周围的皮肤完美贴合。
使用前请记得关闭排放口。

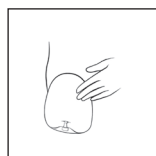

排放口可以隐藏在前面的口袋里，以使其更加舒适和隐蔽。
(仅适用于不透明造口袋)

排空/排放

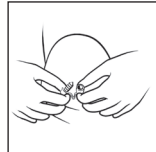

握住塞子/排放口的末端使其朝上，挤压排放口的外端，拔出塞子，松开排放口排放。完全排放后，确保通过完全插入塞子使排放口牢牢关闭。

揭除




将黏胶上的移除手柄从腹部上掀起，然后慢慢向下拉黏胶，轻轻揭除造口袋。
使用您的另一只手对皮肤轻微加压以帮助揭除。

处理


本产品为一次性使用产品，应根据当地规定（作为生活垃圾）处理。不要丢弃在冲水马桶中。

引流袋

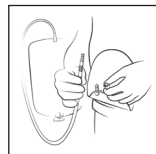

为确保更加牢固可靠，我们建议您使用康乐保引流袋，该引流袋专门设计直接连接进入您的尿路造口袋。并且，通过使用提供的接头，可以将尿路造口袋连接到所有类型的引流袋。接头的窄端被推入尿路造口袋的排放口，另一端连接到引流袋。

造口腰带

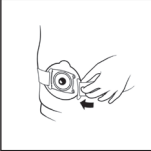

拉动绑带调整长度，使之适合您的体型。不需要揭除覆盖锁扣的造口袋。

将 4 个钩分别与底盘两侧的 4 个腰带卡扣连接。从前开始轻压腹部。然后向远离扣合系统的方向拉带钩，直到它们“咔嗒”卡入到位。

(只适用于有腰带卡扣的产品。)

事故报告

如果在产品使用过程中或在使用后发生了严重的事故，请向制造商和您的国家主管部门报告。

产品特性



- 配有一块由水胶体和聚合物混合材料制成的弹性双层黏胶，可根据个人身体形状贴合身体，并且跟随身体运动而动。
- BodyFit Technology®为适合身体形态而设计，提供更好的贴合性。



- 设计更贴心，造口袋采用中性颜色，以尽量降低在衣服下面的可见度。



- 平面底盘：
- 是胜舒黏胶延展性的2倍。



- 凸面底盘（ 软凸底盘、微凸底盘、深凸底盘 ）：
- 由于凸面底盘曲面网状结构的形状、材料和灵活外形以及双层黏胶的弹性，深凸底盘可自适应自然的身体运动。
 - 具有灵活性和舒适性，不影响稳定性及压力的同时，更贴合凹陷造口周围的腹壁。



- 即使是深凸底盘，其灵活性也是胜舒微凸底盘的2 倍。

符号的解释



医疗器械



表示该产品符合欧洲医疗器械法规



使用期限



批次代码



生产日期



制造商



查阅使用说明



不得二次使用



表示包含医疗器械唯一标识信息的载体



全球贸易项目代码



怕晒



向上



可回收的包装



核磁共振环境下可使用



一件式尿路造口袋，透明袋身，平面底盘



一件式尿路造口袋，透明袋身，软凸底盘



一件式尿路造口袋，透明袋身，微凸底盘



一件式尿路造口袋，透明袋身，深凸底盘



软凸底盘



微凸底盘



深凸底盘