

产品名称：薄型硅胶泡沫敷料

型号：33444，33445，33446，33452，33453



说明书版本编号：23329653
请仔细阅读以下说明书内容。

Coloplast徽标是Coloplast A/S的注册商标。版权所有。©
说明书修订日期：2022-08-04

注册证编号/产品技术要求编号：国械注进20153143139

注册人名称/生产企业名称：康乐保公司 Coloplast A/S
注册人住所/生产企业住所：Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark
注册人联系方式/生产企业联系方式：+45 4911 1111
生产地址：Coloplast utca 2, 4300 Nyirbator, Hungary

代理人名称/售后服务单位：康乐保（中国）医疗用品有限公司
代理人住所：北京市朝阳区丽都花园路5号院1号楼13层1301-1306单元
代理人联系方式：
电话：010-5920 1888
传真：010-5920 1898
康乐保客户服务热线
热线电话：400 700 7668
网址：www.coloplast.com.cn

生产日期和使用期限：见包装标签
产品有效期：三年
原产地：匈牙利

适用范围

本产品适用于伤口湿性愈合及渗出物的处理。适用于多种无渗出/低渗出性伤口。依据医务人员的判断，可以用于正在接受局部抗感染治疗或全身抗感染治疗的患者；适合与加压治疗一起使用；可以和康惠尔清创胶一起用于坏死组织自溶性清创；可以在同一位置最长贴附7天，具体时间长短取决于渗出物的多少、敷料的情况以及伤口类型。

禁忌症
无。

结构及组成

本产品是一次性使用的无菌聚氨酯泡沫敷料，含有硅胶粘合剂，具有吸水性和自粘性。是一种柔软的敷料，与硅胶泡沫敷料相比，它的厚度较薄，由以下部分构成：多孔性软硅胶伤口接触层、吸水性聚氨酯泡沫层和可以让水蒸气通过的热塑性聚氨酯外层薄膜，能够阻隔细菌并防水。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

根据患者实际使用情况，依医生处方，最长累积时间可大于30天。

产品型号在不同国家可能上市不同品规。

如果您出现疑似过敏反应或任何其他副作用，请联系您的专业医务人员。

康乐保公司对于不遵守本使用说明而造成的一切损伤和损失不负责任。

注意事项

对于主要或部分由于动脉供血不足相关原因的糖尿病伤口，医务人员应根据当地指南进行经常地检查和处理。
本产品不得同时和氧化性溶液一起使用，例如次氯酸盐溶液和过氧化氢溶液。确保其他所有挥发性溶液在使用敷料之前都蒸发干净。
包装破损切勿使用
避免日晒

警告

不要重复使用一次性产品，因为可能发生交叉污染，可能导致感染。

再处理、清洗、消毒和/或再消毒可能会损害产品特性，对用户造成额外的身体伤害或感染风险。

储存条件

产品应储存在干燥环境中。

使用说明

准备

按照当地指南清洗伤口和周围皮肤，如温水或生理盐水溶液。

轻轻地弄干周围的皮肤。

如果使用了薄膜、乳霜、软膏或类似的产品，在使用该产品之前，让伤口周围的皮肤干燥。

应用


选择泡沫与伤口边缘重叠大约 1-2 厘米的产品。

打开小袋，从包装上取下产品。




使用保护薄膜以避免接触粘胶面并确保无菌贴敷。

揭除中心保护薄膜。

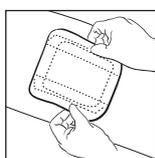

将粘胶面朝向伤口贴敷。

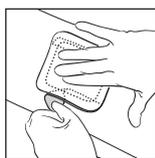

逐个揭除余下的保护薄膜。
用手指在产品的边缘周围轻压，以确保与皮肤均匀和平顺地贴合。

揭除

当出现临床指征、有渗出液靠近泡沫边缘的可见迹象时，应换掉产品。

松开胶粘剂边缘，然后轻轻地将产品从伤口上拿开并取出产品。

处理

本产品为一次性使用产品，应根据当地规定（作为生活垃圾）处理。

不要丢弃在冲水马桶中。

事故报告

如果在产品使用过程中或在使用后发生了严重的事故，请向制造商和您的国家主管部门报告。

符号的解释



医疗器械



表示该产品符合欧洲医疗器械法规



使用期限



批次代码



生产日期



制造商



查阅使用说明



不得二次使用



经环氧乙烷灭菌



单一无菌屏障系统



如包装破损切勿使用



表示包含医疗器械唯一标识信息的载体



全球贸易项目代码



怕晒



可回收的包装



吸收能力指示