

Brava®

 Coloplast

产品名称：造口袋

造口防漏圈

型号：12035 12037 12039 12045 12047
12049



说明书版本编号：23329802

Coloplast徽标是Coloplast A/S的注册商标。

版权所有。©

说明书修订日期：2022-11-15

备案号/产品技术要求编号：国械备20190931号

备案人名称/生产企业名称：康乐保公司 Coloplast A/S

备案人住所/生产企业住所：Holtedam 1, 3050

Humblebaek, Denmark

备案人联系方式/生产企业联系方式：+45 4911 1111

生产地址：Coloplast Hungary KFT, Búzavirág út 15,
2800 Tatabánya, Hungary / Coloplast Volume Mfg.

Costa Rica SA, Calle 58, Zona Franca La Lima, La
Lima, Guadalupe, 30106 Cartago, Costa Rica

代理人名称/售后服务单位：康乐保（中国）医疗用品
有限公司

代理人住所：北京市朝阳区丽都花园路5号院1号楼13
层1301-1306单元

代理人联系方式：

电话：010-5920 1888

传真：010-5920 1898

康乐保客户服务热线

热线电话：400 700 7668

网 址：www.coloplast.com.cn

生产日期和使用期限：见包装标签

产品有效期：两年

原产地：匈牙利/哥斯达黎加

结构及组成

由可塑黏胶和黏胶保护纸组成。其中，可塑黏胶由乙
烯醋酸乙烯酯、聚丙二醇、无定型聚烯烃、聚丁烯、
微晶石蜡、聚丙烯酸和羟乙基纤维素组成。非无菌提
供，一次性使用。

产品描述

本产品为回肠、结肠和尿道造口的护理器械。产品接
触完好皮肤。非无菌提供。

预期用途

本产品用于造口排泄物的收集。

适用范围

使用时可通过调整拉伸至想要的形状，填平造口周围
完整皮肤上的凹陷/褶皱，用于在造口周围的完整皮肤
与造口底盘之间提供密封。

警告

重复使用本一次性产品可能会对用户构成潜在的
风险。再加工、清洗、消毒及灭菌都会影响产品特性，
进而增加患者身体的潜在风险或造成感染危险。

储存条件

避免日晒。

禁忌症

暂无


注意事项

避免日晒。

信息

康乐保公司对于不遵守本使用说明而造成的一切损伤
和损失不负责任。


使用说明 准备

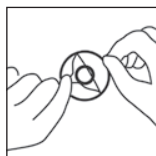

1.移除保护纸

使用造口防漏圈前，确保造口周围
皮肤清洁、干燥。


从包装盒中取出产品，然后捏住移
除凸耳，撕下两侧的黏胶保护纸。

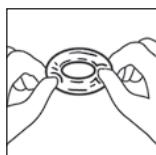

2.调整产品形状

将产品调整拉伸至想要的形状。


佩戴

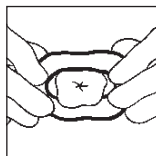

3.佩戴

将造口防漏圈佩戴在造口周围皮肤
上。如有需要，再次调整形状。用
手指调整产品形状，使其边缘紧密
地平贴在皮肤上。

本产品也可先粘贴在底盘上，然后
再将二者一起粘贴至皮肤上。

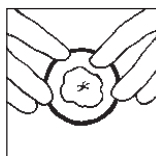

4.佩戴造口袋

正常佩戴造口袋。

揭除


使用后，轻轻从皮肤上揭下底盘与造口防漏圈。产品应与底盘一起揭下。即使皮肤上有少量残留，也不会损伤皮肤或影响后续产品的黏性。

处理

本产品为一次性使用产品，应根据当地规定（作为生活垃圾）处理。不要丢弃在冲水马桶中。

事故报告

如果在产品使用过程中或在使用后发生了严重的事件，请向制造商和您的国家主管部门报告。

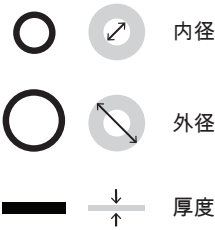

符号的解释

- 医疗器械
- 表示该产品符合欧洲医疗器械法规
- 使用期限
- 批次代码
- 生产日期
- 制造商
- 查阅使用说明
- 不得二次使用
- 表示包含医疗器械唯一标识信息的载体
- 全球贸易项目代码
- 怕晒
- 可回收的包装
- 核磁共振环境下可使用

产品特性



Brava®造口防漏圈在造口和底盘之间形成密封，减少了渗漏的风险，并保护皮肤，从而提供双重保护。造口防漏圈容易佩戴和揭除。其具有较好的黏性，能稳固佩戴在造口周围，提供安全感。Brava®造口防漏圈持久耐用，可以填平造口周围完整皮肤上的凹陷/皱褶。其易于塑形，可紧密贴合在各种褶皱和疤痕造口皮肤上。



全新的聚合物配方使Brava®造口防漏圈能够抵抗排泄物的腐蚀，不会被排泄物分解或溶解。同时，可以保持皮肤的pH值均衡。



全新的聚合物配方使Brava®造口防漏圈从两方面保护皮肤。首先，其可以吸收皮肤表面的水分。其次，当被揭除时，皮肤上的残留极少。使造口周围皮肤更易于清洁，有助于皮肤健康。特别是其有助于降低潮湿相关性皮肤损伤的发生风险。



Brava®造口防漏圈采用Body Fit®Technology（体型适应技术），可适应各种身体形态和动作。其可以灵活塑形，紧密贴合在造口周围，可以在有凹陷和褶皱的皮肤上使用。提供多种尺寸选择，满足不同造口的个性化护理需求。