

Ostomy bag 2-piece open / Bolsa de ostomía de 2 piezas abierta

Ostomy baseplate / Disco adhesivo para ostomías

Ostomy Care / Cuidado de Ostomías



Instrucciones de uso

23329994 Version 1

El logotipo de Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. Todos los derechos reservados. © 2023-01-23

Velcro® pertenece a Velcro Industries B.V

Uso previsto

La bolsa de ostomía está diseñada para recolectar el desecho de un ostoma. El disco adhesivo está diseñado para fijar la bolsa de ostomía y adherirse a la piel sana alrededor del ostoma.

Indicaciones

El dispositivo está indicado para personas con ostomías.

Advertencias

No se recomienda reutilizar este producto desechable, ya que puede ocurrir una contaminación cruzada.

Su reciclaje, limpieza, desinfección o (re)esterilización pueden afectar a las características del producto y exponer al usuario a un riesgo adicional de lesión o infección.

Precauciones

Para un uso adecuado, consulte a su profesional de la salud antes de comenzar a usar un producto convexo.

Información

Bolsa de ostomía para un solo uso.

Los productos están indicados para guardarse en la caja hasta que se retiren para su uso, ya que la caja los protege y la etiqueta de la caja contiene información importante, como el código de lote, la fecha de caducidad y un código de barras único.

No es necesario retirar el dispositivo antes de realizar un escáner por RM, ya que es seguro para un entorno de RM.

Coloplast no se hace responsable de ninguna lesión o pérdida que puedan producirse si este producto no se utiliza siguiendo las actuales recomendaciones de Coloplast.


Condiciones especiales de conservación

Conserve el producto en posición horizontal.


Mantenga el producto alejado de la luz del sol.

Modo de uso


Preparación

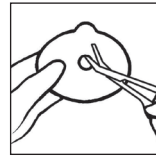


Con una tijera curva pequeña y la guía de corte sobre el disco, corte un orificio en el disco para que calce perfectamente con el tamaño y la forma del ostoma. Puede usar la guía de medición del ostoma que se incluye para medir el tamaño y la forma del ostoma. Es importante que haya un calce perfecto entre el orificio y el ostoma para reducir el riesgo de escape de orina o heces y de problema de la piel.

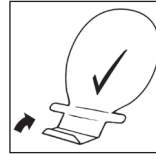

Coloque la bolsa sobre una superficie plana con el lado del acoplamiento hacia abajo. Doble la parte inferior de la salida hacia arriba tres veces, de modo que se vea la tira de Velcro®, para cerrar la salida.

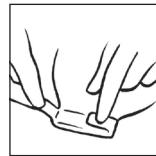

Doble las dos lengüetas hacia adentro para sujetar el Velcro®.

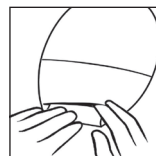

La salida se puede ocultar usando el círculo de Velcro® que se encuentra inmediatamente encima de la salida o la tira de Velcro® que se encuentra en el medio de la bolsa.



(Esto no se aplica a las bolsas transparentes que no tienen tira de Velcro® en el medio de la bolsa).




Limpie bien el ostoma y la zona de la piel que lo rodea. La piel debe estar completamente seca antes de la aplicación del disco.

Aplicación




Despegue la película protectora del disco.

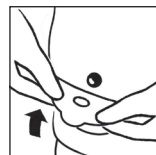



Alinee el disco alrededor del ostoma y ejerza presión sobre el disco para garantizar que se adhiera con rapidez y que el adhesivo se amolde perfectamente a la piel que rodea el ostoma.

El adhesivo debe estar bien ajustado alrededor del ostoma. Para evitar el escape de orina, es importante garantizar un sello hermético alrededor del ostoma. Al ejercer presión sobre el disco/la bolsa en el abdomen, comience en el área alrededor del ostoma y presione el adhesivo en la piel. Deslice un dedo sobre todo el alrededor del ostoma para garantizar que el adhesivo forme un sello. Alise el adhesivo, comience desde el ostoma y mueva hacia afuera hasta los bordes para asegurarse de que el adhesivo esté en pleno contacto con la piel.

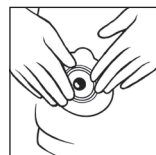

Compruebe que el disco esté seco y limpio (use solamente agua para limpiar el disco). Asegúrese de que el anillo de traba esté abierto. Coloque la parte inferior del acoplamiento de la bolsa en la parte inferior del acoplamiento del disco.

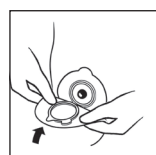

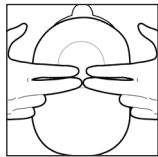

Con los dedos del medio, presione en la parte inferior de la bolsa y el disco para que se unan.




Con los dedos índices, aplique una presión suave sobre la parte superior del acoplamiento hasta que sienta que la bolsa se encuentra en la posición correcta con relación al disco.



Trabe el anillo de cierre presionando la traba para que se una. La bolsa queda bien sujeta al disco cuando se oye un clic.

Cómo vaciar la bolsa

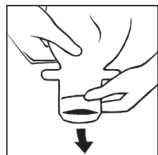

Abra la salida y vacíe la bolsa en el inodoro cuando sea necesario.




Limpie la salida, por ejemplo, con papel higiénico. Después de vaciar la bolsa, doble y vuelva a cerrar la salida de manera segura.


Extracción



Con la punta del dedo presione la pequeña lengüeta que mira hacia su vientre para abrir el anillo de traba y retirar la bolsa.

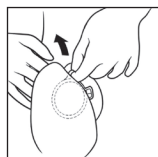

Sujete la pestaña de extracción y extraiga la bolsa despegándola cuidadosamente del disco.

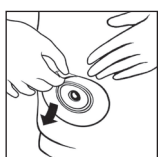

Suavemente retire el disco tirando de la pestaña de extracción en el disco lejos de la piel y enrolle el disco lentamente hacia abajo. Con la mano libre, ejerza una leve presión sobre la piel para facilitar la extracción.

Eliminación

El producto está diseñado para un solo uso y debe eliminarse de conformidad con las normas locales, por ejemplo, junto con los residuos domésticos comunes.


No tire el producto por el inodoro.

Etiqueta del filtro



Si es necesario, para evitar que escape gas, coloque sobre el filtro una de las etiquetas de filtro que se incluyen.

Cinturón

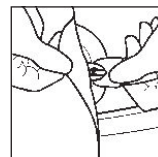

Tire de las cintas para ajustar la longitud del cinturón de manera que se ajuste a su cuerpo. No es necesario retirar la tela que cubre la hebilla. Inserte el gancho del cinturón dentro del anillo en la bolsa o disco de ostomía. Después envuelva el cinturón alrededor del cuerpo y fije el gancho del otro extremo del cinturón al otro anillo en la bolsa o disco de ostomía. De ser necesario, ajuste la longitud del cinturón. (Solo aplica para productos con anillos para cinturón).

Reporte de Incidentes

Si, durante el uso de este dispositivo o como resultado de su uso, se produce un incidente grave, notifíquelo al fabricante y a las autoridades nacionales.

Explicación de los símbolos



Dispositivo médico



Indica que el producto cumple con la legislación europea para dispositivos médicos



Número de catálogo



Fecha de vencimiento (AAAA-MM-DD)



Código de lote



Fecha de fabricación (AAAA-MM-DD)



Fabricante



Consulte las instrucciones de uso



No reutilizar



Indica un portador que contiene información del identificador único de dispositivo



(Global Trade Item Number) Número mundial de artículo comercial



Mantenga el producto alejado de la luz solar



Este lado hacia arriba



Envase reciclable



Seguro para RM