

# Contend™

Öppningsbar urindroppssamlare för män



Contend™

# Avsett ändamål

Skyddsodral för urininkontinens hos män.

## Indikationer

Produkten är indikerad för hantering av mild till måttlig urininkontinens hos vuxna, rörliga män.

Produkten är inte indikerad för män med indragen penis.

## Försiktighet

Återanvändning av engångsprodukten rekommenderas inte eftersom korskontaminering kan inträffa, vilket potentiellt kan leda till lokal infektion.

Reprocessing, rengöring, desinfektion och/eller sterilisering kan försämra produktens egenskaper och utsätta användaren för en ökad risk för fysiska skador eller infektion.

Produkten är inte tillverkad med naturgummilatex. Men i sällsynta fall kan det förekomma kontaminering med spårmängder av naturgummilatex vid tillverkning eller förpackning, vilket potentiellt kan leda till allergiska reaktioner hos patienter med kända eller misstänkta allergier mot naturgummilatex.

## Rapportering av händelser

Om en allvarlig händelse inträffar i samband med användning av produkten eller som ett resultat av dess användning, kontakta tillverkaren och din nationella myndighet.

## Information

Produkten är endast för engångsbruk och är avsedd att sitta på penis.

Varje produkt bör inte användas under mer än 24 timmar.

Om du upplever något av nedanstående symtom i skrevet ska du ta bort eller sluta använda produkten tills symtomen försvinner:

- Hudinfektion/irritation
- Ödem
- Smärta
- Missfärgning

Se till att huden är ren och torr innan du sätter på dig produkten.

Om du använder en hudbefeuktning ska du låta den torka innan du sätter på dig produkten.

Produkten har en kapacitet på 125 ml.

Ta bort produkten innan du badar, duschar eller simmar.

Produkten finns tillgänglig i olika storlekar som skiljer sig på flexkragens storlek.

Välj storlek baserat på dina behov och bekvämlighet.

Inspektera penis en eller två gånger per dag för att undvika hudirritation/uppluckring.

Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå om produkten används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella rekommendationer.


# Användarinstruktion

## Förberedelse

- 1 Klipp pubeshåret vid behov.


## Applicering

2

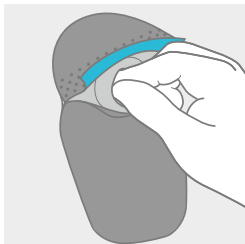

För in fingrarna genom den främre öppningen på produkten för att utvidga flexkragen.

3

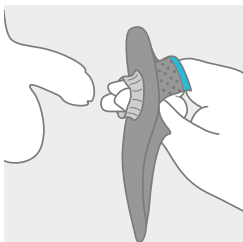


Med samma hand tar du tag i penis och drar in den i produkten genom flexkragen och placerar flexkragen så nära kroppen som möjligt. När du drar igenom penis kommer flexkragen att vändas in i produkten. Detta är avsiktligt, det skapar tätning och gör produkten bekvämare att ha på sig.

Du behöver inte dra tillbaka förhuden.

Justera produkten så att den sitter bekvämt och se till att flexkragen sitter jämnt runt penisstämlet utan veck eller rynkor. Placera penis i produkten.

Användaren uppmanas att utvidga flexkragen mer än en gång om den sitter för hårt.

4

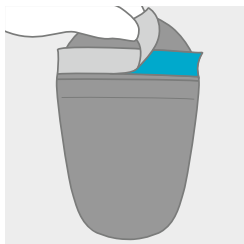

Ta bort skyddsremsan från den främre öppningen.


5



Stäng och förslut produkten. För att säkerställa att produkten är läckagesäker ska du noggrant kontrollera att den främre öppningen är helt försluten hela vägen – var särskilt uppmärksam på båda ändarna i den främre öppningen för att se till att de är ordentligt förslutna.

Produkten är nu redo att användas.

6

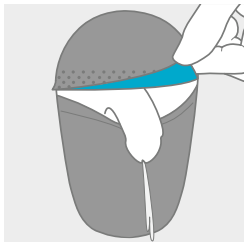

Den främre öppningen är återförlutningsbar. Öppna den för att kissa som vanligt utan att ta bort produkten. Stäng och återförlut efter att du kissat.

7



Sätt på dig vanliga kalsonger och kläder. Som underkläder rekommenderar vi korta kalsonger eller tajts som stöd för produkten.


## Borttagning

8

Det rekommenderas att du byter ut produkten när det absorberande skyddet har nått sin fulla kapacitet eller känns blöt – om hudirritation förekommer ska du ta bort produkten.

## Avfallshantering

9

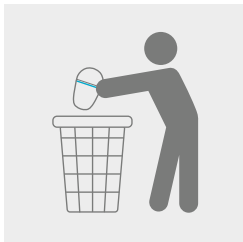

Produkten ska avyttras enligt lokala riktlinjer, dvs. kastas i det vanliga hushållsavfallet.

Spola inte ner produkten i toaletten.

## Förvaring och transport

10

Produkten går att förvara och transportera diskret. Den är platt och inte skrymmande vid förvaring. Den kan vikas så att den går lägga i en byxficka.

Undvik direkt solljus.

## Förklaring av symboler

|                                                                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Medicinteknisk produkt                                                                         |
|    | Indikerar att produkten efterlever den europeiska lagstiftningen för medicintekniska produkter |
|    | Katalognummer                                                                                  |
|    | Använd före datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)                                                                 |
|    | Lotnummer                                                                                      |
|    | Tillverkningsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)                                                                |
|    | Tillverkare                                                                                    |
|    | Ta del av bruksanvisningen                                                                     |
|    | Endast för engångsbruk                                                                         |
|    | Inte tillverkad av naturgummilatex                                                             |
|    | Anger information om unik produktidentifiering                                                 |
|    | (Global Trade Item Number) Globalt artikelnummer                                               |
|  | Skyddas från solljus                                                                           |
|  | Denna sida upp                                                                                 |
|  | Återvinningsbar förpackning                                                                    |



[contend.com/lardigmer](https://contend.com/lardigmer)



Coloplast A/S  
Holtedam 1  
3050 Humlebaek  
Denmark

sv

#### Bruksanvisning

Läs följande instruktioner noggrant.

23340446 Version 3

Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör  
Coloplast A/S. Med ensamrätt. © 2022-03-18

