

Besondere Lagerungsbedingungen


Vor direktem Sonnenlicht schützen.

Bewahren Sie das Produkt in horizontaler Lage auf.


Anwendung

Vorbereiten

Reinigen Sie den Applikationsbereich gründlich. Wenden Sie bei der Öffnung der Verpackung und während des Anbringens unbedingt aseptische Techniken an.

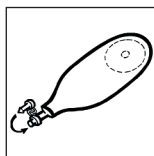


Verschließen Sie den Auslassstößel unten am System.

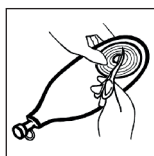


Schneiden Sie mit einer kleinen gebogenen Schere ein Loch in Größe und Form der Drainage in den Hautschutz. Damit die Wunde nicht bedeckt wird, kann der Außenrand des Hautschutzes zurechtgeschnitten werden.

Applizieren

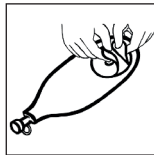


Entfernen Sie das weiße Schutzpapier vom Hautschutz. Das kleine transparente Schutzpapier kann unmittelbar vor dem Anbringen entfernt werden. Die Haut um die Drainage sollte vor dem Anbringen sauber und trocken sein.

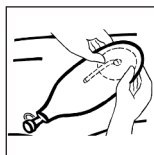

Legen Sie den Beutel auf die Drainage. Führen Sie die Drainage in den Beutel ein.


Drücken Sie den Hautschutzring vorsichtig auf die Haut.

Entleeren/Drainage

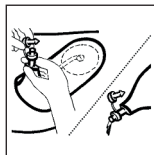

Um den Beutel zu entleeren, halten Sie den Auslass nach oben. Drücken Sie das Auslassventil zusammen, um die Kappe zu lösen. Entfernen Sie die Kappe und leeren Sie den Beutel aus. Achten Sie darauf, dass der Beutel vollständig geleert ist, bevor Sie die Kappe wieder aufsetzen.

Anschluss an Nachtbeutel

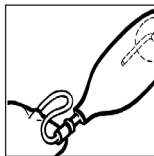

Anschluss an Nachtdrainagebeutel: Der Drainagebeutel kann an die meisten Systeme angeschlossen werden, indem einfach die Auslasskappe entfernt und das Auslassventil über einen Anschluss direkt mit dem Drainagesystem verbunden wird.

Entfernen

Entleeren Sie den Beutel. Entfernen Sie den Beutel vorsichtig, indem Sie den Hautschutz langsam von der Haut nach unten abrollen. Üben Sie gleichzeitig mit der freien Hand etwas Gegendruck auf die Haut aus.

Entsorgung

Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und sollte gemäß den örtlichen Richtlinien, z. B. zusammen mit dem normalen Hausmüll, entsorgt werden.

Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.



Gebrauchsanleitung

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

23340782 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten. © 2021-12-06

Verwendungszweck

Der Drainagebeutel ist zum Abdecken von Wund-/Fisteldrainagen in der Bauchregion und zum passiven Auffangen von Sekreten wie Blut, Lymphe und Wundwasser aus Fisteln und infizierten Wunden indiziert.

Indikationen

Der Drainagebeutel ist zur Ableitung von Körperflüssigkeiten aus den inneren Organen wie z. B. Wunddrainagen und/oder Fistelsekret, Blut und Lymphe in der Bauchregion indiziert.

Warnhinweise

Einwegprodukt nicht wiederverwenden, da es zu einer Kreuzkontamination kommen kann, die potenziell zu einer Infektion führt.

Wiederaufbereitung, Waschen, Desinfektion und/oder Resterilisation können die Produktmerkmale beeinträchtigen und hierdurch ein zusätzliches Körperverletzungs- oder Infektionsrisiko für den Anwender verursachen.

Vorsichtshinweise

Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist, da die Sterilität des Produkts beeinträchtigt sein könnte. Eine Infektion könnte die Folge sein.

Das Produkt wird ohne Naturlatex hergestellt, jedoch kann es in seltenen Fällen beim Herstellungs- oder Verpackungsprozess zu einer Kontamination mit Spuren von Naturlatex kommen, die bei Patienten mit bekannter oder vermuteter Allergie auf Naturlatex allergische Reaktionen auslösen kann.

Information

Der Drainagebeutel ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und ist steril.

Die aufgedruckte Füllanzeige dient nur zur Orientierung hinsichtlich der Füllmenge.

Der Drainagebeutel wird durch Bestrahlung sterilisiert.

Das Produkt muss vor einer Untersuchung im Kernspintomografen nicht entfernt werden, da es MR-sicher ist.

Meldung von Zwischenfällen

Wenn es während oder infolge der Anwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Zwischenfall kommt, melden Sie dies bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Landes.

Erläuterung der Symbole



Medizinprodukt



Zeigt an, dass das Produkt der europäischen Gesetzgebung für Medizinprodukte entspricht



Katalognummer



Verfalldatum (JJJJ-MM-TT)



Chargennummer



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten



Nicht wiederverwenden



Sterilisiert durch Bestrahlung



Einfaches Sterilbarrieresystem



Frei von Naturlatex



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Ziehen Sie die Gebrauchsanweisung zurate



Zeigt einen Datenträger mit einer einheitlichen Produktkennzeichnung für Medizinprodukte an



(Global Trade Item Number) Globale Artikelidentnummer



Vor direktem Sonnenlicht schützen



Hier oben



Wiederverwertbare Packung



MR-sicher