

SenSura®
SenSura® Xpro
SenSura® Convex
SenSura® Convex Xpro

Bolsa de urostomía de 1 pieza

Accesorio para ostomías



Instrucciones de uso

23341057 Version 2

El logotipo de Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. Todos los derechos reservados. © 2022-01-25

Coloplast de Argentina S.A.
Bouchar 547 - Piso 8
(C1106ABG) C.A.B.A. - Argentina
Tel: (011) 3985-5900
Atención Gratuita al usuario:
0800-777-7008

www.coloplast.com.ar

Dir.Téc:Farm. Mabel A.Urruzola M.N. N°: 9.175

Autorizado por La ANMAT PM N°710-18

USO SIN PRESCRIPCIÓN

Fin previsto

La bolsa de ostomía está diseñada para recolectar el desecho de un ostoma de manera pasiva. El disco adhesivo se fija a la bolsa de ostomía y está diseñado para adherirse a la piel intacta que rodea el ostoma.

Indicaciones

El dispositivo está indicado para personas con una ostomía.

Advertencias

Se recomienda no reutilizar este producto desechable, ya que se puede producir contaminación cruzada.

Su reciclaje, limpieza, desinfección o (re)esterilización pueden afectar a las características del producto y exponer al usuario a un riesgo adicional de lesión o infección.

Precauciones

Para un uso apropiado, consulte con un profesional de la salud antes de utilizar un producto convexo.

Información

Bolsa de urostomía de un solo uso.

Los productos deben mantenerse guardados en la caja hasta su utilización, ya que la caja los protege y la etiqueta de la caja contiene información importante como número de lote, fecha de vencimiento y un código de barras único.

No es necesario quitar el dispositivo antes de una resonancia magnética ya que es inocuo para las resonancias.

Coloplast no se hace responsable de ninguna lesión o pérdida que puedan producirse si este producto no se utiliza siguiendo las actuales recomendaciones de Coloplast.

Condiciones especiales de conservación


Conserve el producto en posición horizontal.

Mantenga el producto alejado de la luz solar.



Modo de empleo

Preparación

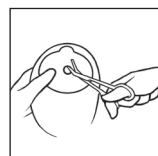

Utilice una tijera pequeña curva, preferentemente siguiendo la guía de corte que se indica en el adhesivo, corte un orificio que se adapte al tamaño y a la forma exacta del ostoma.

Puede utilizar la guía de medición de ostoma incluida en el envase para medir el tamaño y la forma del ostoma. Es importante que el orificio y el ostoma coincidan completamente para reducir el riesgo de derrames y problemas de la piel.




Limpie completamente el ostoma y la piel a su alrededor. Antes de aplicar el adhesivo, la piel debe estar completamente seca.

Aplicación



Despegue el film protector del adhesivo.

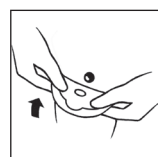


Alinee el adhesivo alrededor del ostoma y presione firmemente contra la piel.

El adhesivo debe ajustarse exactamente al ostoma. Para evitar derrames, es importante asegurarse de que el ostoma quede completamente sellado. Al ejercer presión a la placa base/bolsa contra el abdomen, comience en la zona alrededor del ostoma y presione el adhesivo contra la piel. Pase un dedo alrededor del ostoma para comprobar que el adhesivo lo haya sellado bien. Alise el adhesivo, desde el ostoma hacia el borde, para comprobar que el adhesivo tenga contacto absoluto con la piel.



Aplice presión a la bolsa para asegurar una adhesión rápida y un ajuste perfecto entre el adhesivo y la piel alrededor del ostoma.


Recuerde cerrar la salida antes de su uso.

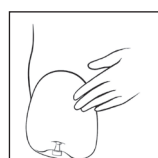

La salida/tapón puede ocultarse en el compartimento delantero para permitir una apariencia más cómoda y discreta.


(Solo corresponde a bolsas con material antimicrobiano no tejido en la parte frontal).

Instrucciones para vaciar la bolsa

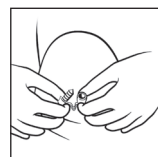

Sostenga el tapón/extremo de la salida hacia arriba y comprima el extremo exterior de la misma, tire del tapón, descomprima la salida y vacíe la bolsa. Después de drenar completamente, asegúrese de que el tapón esté completamente insertado para que la salida esté bien cerrada.

Extracción

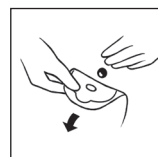

Retire suavemente la bolsa tirando de la pestaña de extracción del adhesivo hasta desprenderla de la piel, y enrolle el adhesivo lentamente hacia abajo.


Con la mano libre, ejerza una leve presión sobre la piel para ayudar a retirarla.

Eliminación

El producto está diseñado para un solo uso y debe eliminarse según la reglamentación local (por ejemplo, junto con los residuos domésticos comunes).

No tire el producto por el inodoro.

Bolsa de drenaje de cama

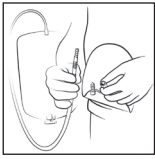

Para mayor seguridad, le recomendamos que utilice la bolsa de drenaje de cama Coloplast, especialmente diseñada para conectar directamente a su bolsa de urostomía. No obstante, las bolsas de urostomía pueden conectarse a todos los tipos de bolsas de drenaje de cama mediante el conector suministrado.

El extremo angosto del conector se introduce en la salida de la bolsa de urostomía y el otro extremo se conecta a la bolsa de drenaje de cama.

Informe de incidentes

Si, durante el uso de este dispositivo o como resultado de su uso, se produce un incidente grave, informe del hecho a su fabricante y a su autoridad nacional.

Explicación de los símbolos



Dispositivo médico



Indica que el producto cumple con la legislación europea para dispositivos médicos



Número de catálogo



Fecha de caducidad (AAAA-MM-DD)



Código de lote



Fecha de fabricación (AAAA-MM-DD)



Fabricante



Consulte las instrucciones de uso



No reutilizar



Indica un código de barras que contiene una identificación única de dispositivo



(Global Trade Item Number) Número mundial de artículo comercial



Mantenga el producto alejado de la luz solar



Este lado hacia arriba



Caja reciclable



Inocuo para RM