


Bolsas de ostomía de una y dos piezas

Bolsas cerradas, abiertas y de urostomía.



IFU11714 v.3 El logotipo de Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. © [2009-10] Todos los derechos reservados. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk (Dinamarca).

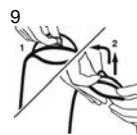

**4. Aplicación de la bolsa de dos piezas**

Asegúrese de que el anillo de cierre está abierto. Presione la bolsa y la placa base entre sí, empezando por la parte inferior. Pase los dedos alrededor del acoplamiento en la parte exterior de la bolsa, de abajo a arriba. Cuando oiga un ligero clic, la bolsa estará colocada en la placa base de forma segura. La bolsa se puede girar a su posición óptima.

**5. Cierre de la bolsa**

A continuación, cierre el anillo de cierre. Cuando oiga un clic, la bolsa estará fijada al disco de forma segura.

**6. Cierre de la bolsa**

Retire la pinza de la lámina y también el papel protector. Coloque la cara adhesiva hacia abajo en la abertura. Si la pinza no se coloca correctamente la primera vez, retírela y vuelva a colocarla. Pliegue la bolsa hacia arriba 4-5 veces en dirección a la piel y luego pliegue hacia atrás los extremos de la pinza. Con una pinza dura, solo es necesario plegar la bolsa una vez antes de cerrar la pinza.

**7. Drenaje de las bolsas de urostomía**

Sostenga el tapón o el extremo de la salida hacia arriba y presione el extremo exterior de la salida, saque el tapón, relaje la presión en la salida y drene la bolsa. Una vez completado el drenaje, asegúrese de que la salida está bien cerrada, con el tapón completamente introducido.

**8. Retirada de la bolsa de una pieza**

La bolsa se retira despegándola de la piel hacia abajo lenta y cuidadosamente, mientras que se mantiene la piel tensa con la otra mano.

**9. Retirada de la bolsa y la placa base**

**Bolsa:**

1. Abra el anillo de cierre presionando la pestaña pequeña con la punta del dedo.
2. Retire la bolsa de la placa base levantándola y tirándola de la placa base al mismo tiempo. Resultará más fácil si sujeta la parte superior de la bolsa.

**Disco:**

El disco se retira despegándola de la piel hacia abajo lenta y cuidadosamente, mientras que se mantiene la piel tensa con la otra mano.

**Advertencia**

La reutilización de este producto de un solo uso podría plantear graves riesgos para el usuario. El reprocesamiento, la limpieza, la desinfección y la esterilización pueden afectar a las características del producto y exponer al paciente a un riesgo adicional de lesión o infección.

**Almacénesse a temperatura ambiente.**

**Precaución**


Coloplast no se hace responsable de ninguna lesión o cualquier otra pérdida que pueda surgir por el uso de este producto sin seguir las recomendaciones actuales de Coloplast.

Pida consejo al médico o enfermero que cuida su estoma antes de utilizar los productos Convex.

**Uso previsto**

El disco adhesivo para ostomía y la bolsa de ostomía Alterna están diseñados para recoger las secreciones de un estoma. El disco adhesivo está pensado para adherirse a la piel periestomal y se utiliza para la colocación de las bolsas de ostomía.

**Cómo utilizar las bolsas:**

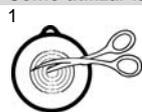


**1. Recorte del disco**

Dibuje el tamaño y la forma del estoma sobre la guía de estomas. Corte el orificio para ajustar el tamaño y la forma del estoma. El corte es más fácil si utiliza unas tijeras curvas. No corte más allá del último círculo de la placa base. Asegúrese de que la piel está limpia y seca antes de aplicar la placa base.



**2. Retirada del papel protector**

Retire primero el papel protector transparente. Coloque el pulgar sobre la pestaña y tire del papel protector con la otra mano.

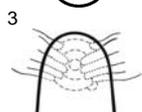

**3. Aplicación de la bolsa de una pieza y de la placa base de dos piezas**

Coloque el adhesivo sobre la piel asegurando un ajuste perfecto alrededor del estoma. Presione firmemente la piel, empezando por la parte inferior y alisando hacia arriba con los dedos.

